



# Hypafix®

## Adesivo para Fixação de Curativos, Cateteres e Drenos

### Descrição:

Adesivo hipoalergênico à base de poliacrilato em rolo, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm<sup>2</sup>, composto por material em non-woven de poliéster elástico, branco e poroso. Livre de látex. Não estéril.

### Indicações:

Indicado para fixação de curativos, cateteres e drenos. Não estéril, deve ser aplicado somente sobre pele íntegra. O produto pode permanecer de um a vários dias dependendo do estado do adesivo e da condição da pele.

### Advertências e Precauções:

Não deve ser aplicado sob muita tensão devido ao risco de formação de bolhas e edemas. Não usar em pacientes com intolerância conhecida a adesivos acrílicos. O fabricante recomenda uso único.

### Contraindicações:

Não aplicável.

### Composição do produto:

Não tecido de poliéster elástico, adesivo de poliacrilato e papel protetor siliconado com picote central para abertura. Planimetria de 1cm<sup>2</sup>. Livre de látex.

| Características                                | Benefícios                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Conformável elástico e flexível                | Adaptação aos contornos anatômicos          |
| Adesivo acrílico hipoalergênico                | Diminui o risco de irritações da pele       |
| Permeável a vapores                            | Evita maceração na pele                     |
| Radiotransparente                              | Permite a realização de exames radiológicos |
| Papel siliconado protetor com abertura central | Fácil aplicação                             |

### Modo de Uso:

1. Prepare e limpe a pele ao redor da lesão, removendo bem toda a umidade.
2. Selecione o tamanho apropriado do Hypafix, desenrole a quantidade necessária e corte-a com uma tesoura.
3. Remova o papel protetor da superfície adesiva e aplique a fita sobre o curativo, deixando uma pequena parte para ser fixada sobre a pele.



**Esterilização:** Não estéril

**Validade:** 5 anos a partir da data de fabricação

**Armazenamento:** Armazenar à temperatura ambiente em local seco, arejado e ao abrigo da luz

**Fabricação:** BSN Medical - Alemanha

**Registro na ANVISA:** 10224000053

**Validade do Registro:** Não aplicável

**NCM:** 30.05.1090

**Responsável Técnica:** Juliana K. Schuh - CRF/SP 65.617

| Apresentação: |               |                   |              |                 |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Código NART   | Código Simpro | Código Brasíndice | Apresentação | Quantidade      |
| 71443-00      | 253305        | 71443-00          | 2,5cm x 10m  | Cx. c/ 01 unid. |
| 71443-01      | 253306        | 71443-01          | 5cm x 10m    | Cx. c/ 01 unid. |
| 71443-02      | 253307        | 71443-02          | 10cm x 10m   | Cx. c/ 01 unid. |
| 71443-03      | 253308        | 71443-03          | 15cm x 10m   | Cx. c/ 01 unid. |