


LEGENDA:

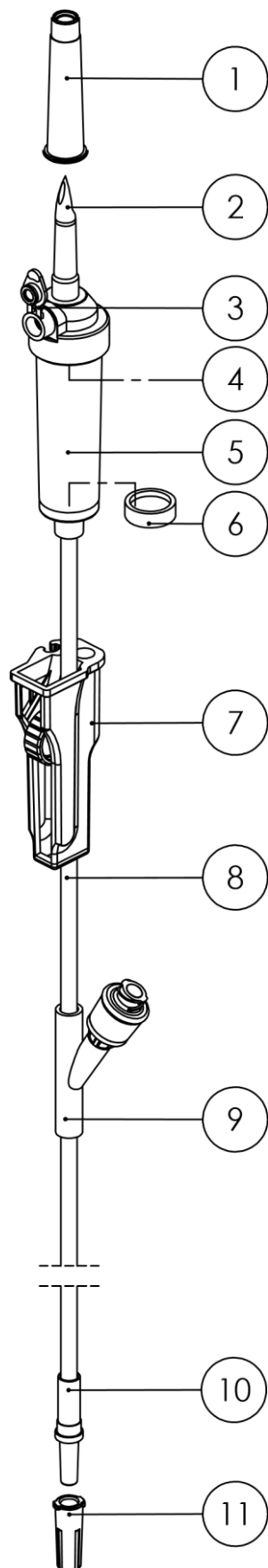

- 1. PROTETOR DA PONTA PERFURANTE** – Tem a finalidade de manter íntegra e estéril a ponta perfurante, até que seja feita a conexão da mesma ao frasco/ampola.
- 2. PONTA PERFURANTE** – Fabricada de acordo com a norma da ABNT NBR/ISO. Destinada a adaptação do equipo a qualquer frasco/ampola de soluções com facilidade e segurança.
- 3. FILTRO DE AR** – Filtro hidrófobo e bacteriológico que permite que o ar devidamente filtrado penetre no frasco/ampola a fim de que a solução seja escoada por gravidade para a câmara de gotejamento sem nenhum risco de contaminação. Proporciona alto desempenho na retenção de microrganismos.
- 4. GOTEJADOR MACROGOTAS** - ajustado para 20 gotas = 1ml;
- 5. CÂMARA DE GOTEJAMENTO** – Flexível e transparente, permite monitorar e controlar o fluxo da solução a ser administrada. Isenta de DEHP (2-etilhexil ftalato).
- 6. FILTRO DE FLUIDOS** – Está firmemente acoplado no interior da câmara de gotejamento. Tem a finalidade de filtrar a solução administrada permitindo a passagem da mesma com total segurança. Possui barreira de 15 µm.
- 7. REGULADOR DE FLUXO tipo Clamp Rolete** – Ajusta de forma precisa o fluxo da solução de infusão possibilitando interromper e reiniciar o fluxo de acordo com necessidades protocolares. Permite o uso contínuo durante uma infusão sem danificar o tubo.
- 8. TUBO TRANSPARENTE FLEXÍVEL** – A sua flexibilidade permite uma maior facilidade de movimentação, permitindo conforto ao paciente. Isento de DEHP.
- 9. INJETOR LATERAL VALVULADO (VÁLVULA NEEDLE-FREE Y ALTO FLUXO)** - Dispositivo que possibilita administração secundária de fluidos por acionamento da válvula que é provida de luer fêmea. Seu mecanismo de ação mantém o sistema sempre fechado permitindo que o acesso ao sistema interno de infusão do equipo seja efetuado diretamente pelo luer macho de seringas. Desta forma elimina-se completamente o uso de agulhas metálicas para essa finalidade. Resiste a múltiplos acionamentos
- 10. CONECTOR LUER SLIP MACHO** – Permite o acoplamento de qualquer tipo de dispositivo que possua conector luer fêmea.
- 11. PROTETOR DO CONECTOR LUER MACHO COM FILTRO** – Contém uma membrana hidrofóbica para realizar o preenchimento total do equipo de infusão gravitacional sem abertura do sistema de infusão. Adequado para proteger e manter íntegro e estéril o conector luer macho.

CARACTERÍSTICAS:

- Gotejador **Macrogotas** ajustado para 20 gotas = 1ml;
- **Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais;**
- **Comprimento do tubo: 1,500mm;**
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico;
- Esterilizado por gás Óxido de Etileno;
- Validade: 60 meses com a embalagem intacta.

ADVERTÊNCIAS:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto;
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto;
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

CÓDIGO	MODELO COMERCIAL
060372	EQUIPO MACRO C/ FILTRO AR C/ INJETOR LATERAL VALVULADO ALTO FLUXO LUER SLIP C/ PROTETOR C/ FILTRO

ANVISA: 81516739009 | Nº CERTIFICADO INMETRO: NCC 23.09811

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

REFERÊNCIA NORMATIVA:

ABNT NBR ISO 8536-4: 2011 - Equipamentos de infusão para uso médico - Parte 4: Equipos de infusão para uso único, alimentação por gravidade.