


Infusor 4 Vias Valvulado Alto Fluxo Auto Priming Para Cateter Luer Slip

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais contínuas ou intermitente. Possui sistema de infusão valvulado livre de agulha que permite múltiplos acessos ao sistema e dispensa o uso de tampas protetoras e oclusores, é provido de dispositivo que permite o preenchimento automático de priming.

Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em sete dias.
- Vazão de fluxo:
 - Gravitacional: 200mL/min.
 - Pressão (bomba): 600mL/min.
- Volume Total de Priming: 2,9mL.
- Volume do Priming (espaço morto) do Conector Valvulado:
 - Item 1: 0,04mL.
- Pressão em linha: 400psi.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Citostáticos, Hemoderivados e Lipídios.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

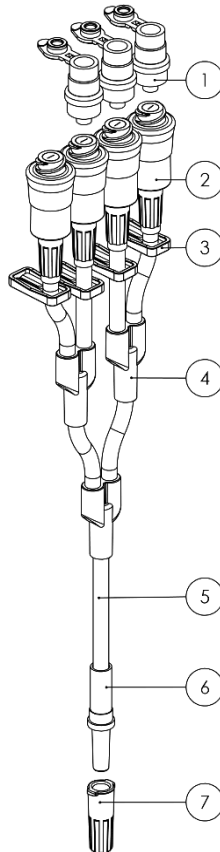

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Legenda:

- 1 – Conector Fêmea Valvulado Livre de Agulha:** Provido de luer fêmea com válvula de silicone grau médico totalmente transparente, dispensa o uso de agulhas e/ ou cânulas e mantém o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.
- 2 – Clamp Corta-Fluxo:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.
- 3 – Adaptador 02 vias:** Tem a função de permitir a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.
- 4 – Tubo flexível e transparente:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.
- 5 – Conector Luer Slip Macho:** Tem a função de promover a conexão entre o Sistema de Infusão e o Acesso Venoso.
- 6 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro:** Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.
- 7 – Luer Lock Macho com Filtro:** Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, tem a função de eliminar o ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto, seu mecanismo de ação permite o preenchimento simultâneo das vias sem que ocorra vazamento de fluido.

Anvisa: 81516739006

Modelo do produto: 060324

Farm. Responsável: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br