


Infusor 4 vias Valvulado Auto Priming para Cateter Spin Lock

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em Sistema Fechado. Possui Sistema de Infusão valvulado que dispensa o uso de agulhas, cânulas, tampas protetoras e oclusores.

Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em sete dias.
- Vazão de fluxo:
 - Gravitacional: 200 ml/min.
 - Pressão(bomba): 600mL/min.
- Volume total de Priming: 2,9 mL.
- Volume de Priming (espaço morto) do Conector Valvulado- item 2: 0,04mL
- Volume de Flushing por via: 2,0 ml.
- Pressão em linha: 400 psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Compatível com RM e TC.
- Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

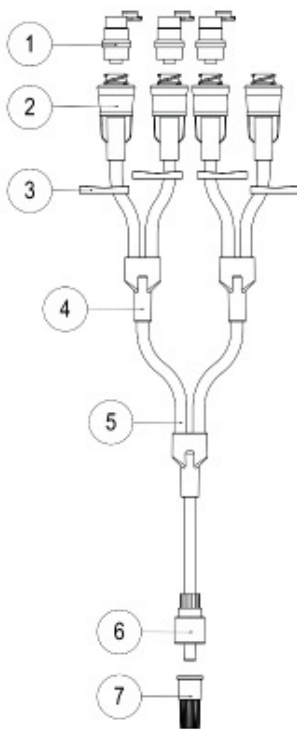

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Legenda:

1 – Luer Lock Macho com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, tem a função de eliminar o ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto, seu mecanismo de ação permite o preenchimento simultâneo das vias sem que ocorra vazamento de fluido.

2 – Conector Fêmea Valvulado Livre de Agulha: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas junto a outros dispositivos providos de luer macho com mesmo padrão de fabricação. Possui válvula de silicone grau médico, permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.

3 – Clamp Corta-Fluxo: Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.

4 – Adaptador 2 vias: Tem a função de permitir a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.

5 – Tubo flexível e transparente: Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão, preservando assim a integridade do Acesso Venoso.

6 – Conector Spin Lock Macho: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas entre o Sistema de Infusão e outros dispositivos providos de luer fêmea com o mesmo padrão de fabricação.

7 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.

Anvisa: 81516739006

Modelo do produto: 060328

Farm. Responsável: Cristiane S. S Mattos – CRF-BA 4139

Ver 03_17.11.2022

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br