


## Infusor 2 vias Valvulado Neutro para Cateter Spin Lock

**Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em Sistema Fechado. Possui Sistema de Infusão valvulado que dispensa o uso de agulhas, cânulas, tampas protetoras e oclusores.**

### Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em sete dias.
- Vazão de fluxo:
  - Gravitacional: 200mL/min.
  - Pressão (bomba): 600mL/min.
- Volume total de Priming: 1,2mL.
- Volume de Priming (espaço morto) do Conector Valvulado – item 1: 0,04mL
- Volume de flushing: 3mL.
- Pressão em linha: 400psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Compatível com RM e TC.
- Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

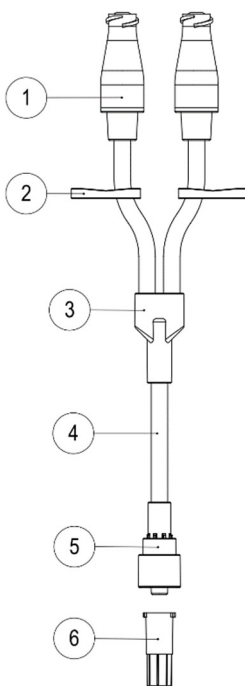

### Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

### Legenda:

**1 – Conector Fêmea Valvulado Livre de Agulha:** Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas junto a outros dispositivos providos de luer macho com mesmo padrão de fabricação. Possui válvula de silicone grau médico, permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.

**2 – Clamp Corta-Fluxo:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.

**3 – Adaptador 2 vias:** Tem a função de permitir a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.

**4 – Tubo flexível e transparente:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão, preservando assim a integridade do Acesso Venoso.

**5 – Conector Spin Lock Macho:** Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas entre o Sistema de Infusão e outros dispositivos providos de luer fêmea com mesmo padrão de fabricação.

**6 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro:** Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.

Anvisa: 81516739007

Modelo do produto: 060334

Farm. Responsável: Cristiane S. S. Mattos – CRF-BA 4139