


Infusor 4 Vias Valvulado Neutro Auto Priming Luer Lock Reversível com Filtro de Ar

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em Sistema Fechado. Possui Sistema de Infusão valvulado com deslocamento Neutro que dispensa o uso de agulhas, cânulas, tampas protetoras e oclusores.

Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em sete dias.
- Vazão de fluxo:
 - Gravitacional: 200 mL/min.
 - Pressão (bomba): 600mL/min.
- Volume total de priming: 3,0 mL.
- Volume de Priming (espaço morto) do Conector Valvulado – item 2: 0,04mL
- Volume de flushing por via: 2,0 mL.
- Pressão em linha: 400 psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Compatível com RM e TC.
- Embalado em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

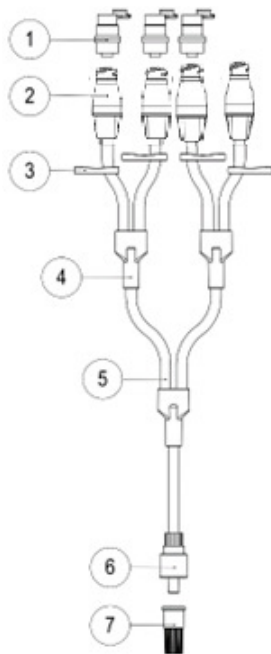

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Legenda:

1 – Luer Lock Macho com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, tem a função de eliminar o ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto, seu mecanismo de ação permite o preenchimento simultâneo das vias sem que ocorra vazamento de fluido.

2 – Conector Fêmea Valvulado Neutro Livre de Agulha: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas junto a outros dispositivos providos de luer macho com mesmo padrão de fabricação. Possui válvula de silicone grau médico, permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.

3 – Clamp Corta-Fluxo: Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.

4 – Adaptador 2 vias: Tem a função de permitir a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.

5 – Tubo flexível e transparente: Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão, preservando assim a integridade do Acesso Venoso.

6 – Conector Spin Lock Macho: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas entre o Sistema de Infusão e outros dispositivos providos de luer fêmea com mesmo padrão de fabricação.

7 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.

Anvisa: 81516739007

Modelo do produto: 060344

Farm. Responsável: Cristiane S. S Mattos – CRF-BA 4139