


INDICADO PARA USO EM TERAPIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS SIMULTÂNEAS COMPATÍVEIS.

LEGENDA:

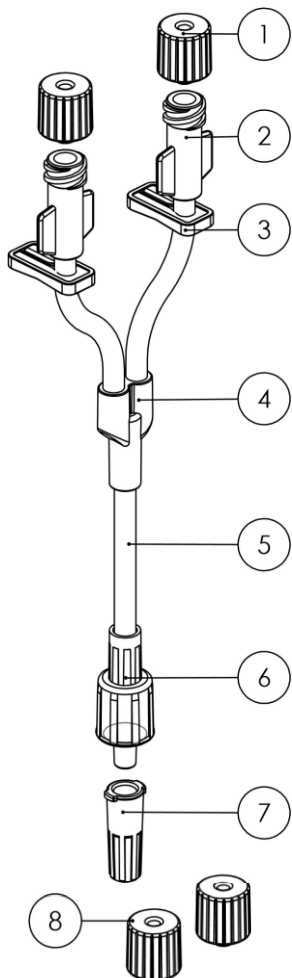

- 1. PROTETOR DO CONECTOR LUER LOCK FÊMEA:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Lock Fêmea até o momento de uso do produto.
- 2. CONECTOR LUER LOCK FÊMEA:** Proporciona encaixes precisos e seguros entre o Infusor e outros produtos providos de conectores com padrão luer macho (Ex.: Equipos, Seringas, Extensores...).
- 3. CLAMP CORTA-FLUXO:** Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão sempre que necessário.
- 4. ADAPTADOR 02 VIAS:** Promove a união das múltiplas entradas do produto, adaptando-as à saída única direcionada ao Acesso Venoso.
- 5. TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE:** Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.
- 6. CONECTOR LUER LOCK MACHO REVERSÍVEL ROTATIVO (SPIN LOCK):** Possui mecanismo com rosca rotativa padrão luer lock reversível ao tubo. Proporciona encaixe preciso e seguro, eliminando completamente o risco de desconexões acidentais entre o Infusor e o Acesso Venoso.
- 7. PROTETOR DO CONECTOR LUER LOCK MACHO:** Mantém íntegro e estéril o Conector Luer Lock Macho até o momento de uso do produto.
- 8. PROTETORES DO CONECTOR LUER LOCK FÊMEA ADICIONAIS:** Utilizáveis para proteger o(s) Conector(es) Luer Lock Fêmea quando desconexões protocolares entre os Sistemas de Infusão sejam necessárias.

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente transparente.
- Vazão de fluxo: 230ml/min.
- Volume de Priming: 1,4ml.
- Pressão em linha: 400 psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses

ADVERTÊNCIAS:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto;
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto;
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

CÓDIGO	MODELO COMERCIAL
060047	INFUSOR 02 VIAS SPIN LOCK COM 02 TAMPAS ADICIONAIS COM CLAMP

ANVISA: 81516730004

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

REFERÊNCIA NORMATIVA:

- ABNT NBR ISO 594 - 1:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR ISO 594 - 2:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 2: Montagem fixa.
- ABNT NBR ISO 80369 - 7:2022 - Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases para aplicação em saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravasculares ou hipodérmicas.
- ABNT NBR ISO 8536 - 4:2011 - Equipamento de infusão para uso médico - Parte 4: Equipos de infusão para uso único, alimentação por gravidade.

Rev:01_19.02.2024