


Multivia-2 Neo Valvulado Priming Reduzido para Cateter Luer Slip

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais simultâneas compatíveis em Sistema Fechado em Neonatologia e Pediatria. Possui Sistema de Infusão valvulado que dispensa o uso de agulhas, cânulas, oclusores e tampas protetoras.

Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em sete dias.
- Vazão de fluxo:
 - Gravitacional: 180 mL/min.
 - Pressão (bomba): 600mL/min.
- Volume total de Priming: 0,3 mL.
- Volume do Priming (espaço morto) do conector valvulado - item 2: 0,04mL
- Volume de flushing por via: 0,5 mL.
- Pressão em linha: 400psi.
- Compatível com Álcóol, Clorexidina, Citostáticos, Hemoderivados e Lipídios.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

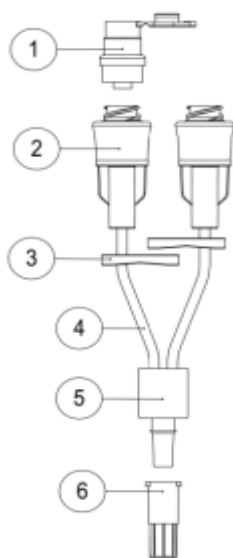

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Legenda:

1- Luer Lock Macho com filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, tem a função de eliminar o ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto, seu mecanismo de ação permite o preenchimento simultâneo das vias sem que ocorra vazamento de fluido.

2 – Conector Fêmea Valvulado Livre de Agulha: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas junto a outros dispositivos providos de luer macho com mesmo padrão. Possui válvula de silicone grau médico, permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.

3 – Clamp Corta-Fluxo: Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.

4 – Tubo flexível e transparente: Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.

5 – Conector Multivia-2 Luer Slip Macho: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas entre o Sistema de Infusão e outros dispositivos providos de luer fêmea com mesmo padrão de fabricação.

6 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.

Anvisa: 81516739003

Modelo do produto: 060291

Farm. Responsável: Cristiane Souza dos Santos Mattos – CRF-BA-4139

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br

Ver03 _07-03-23