


Multivia-2 Neo Valvulado Neutro Priming Reduzido para Cateter Luer Slip

Indicado para uso em terapias de administração de soluções parenterais em Sistema Fechado em Neonatologia e Pediatria. Possui Sistema de Infusão valvulado com deslocamento Neutro que dispensa o uso de agulhas, cânulas, oclusores e tampas protetoras.

Características:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em 7 dias.
- Vazão de fluxo:
 - Gravitacional: 180 mL/min.
 - Pressão (bomba): 600mL/min.
- Volume total de priming: 0,3 mL.
- Volume do priming (espaço morto) do conector valvulado – item 1: 0,04mL
- Volume de flushing por via: 0,5 mL
- Pressão em linha: 400psi.
- Livre de BPA, DEHP, Látex e Metais.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Hemoderivados e Lipídios
- Compatível com RM e TC.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses.

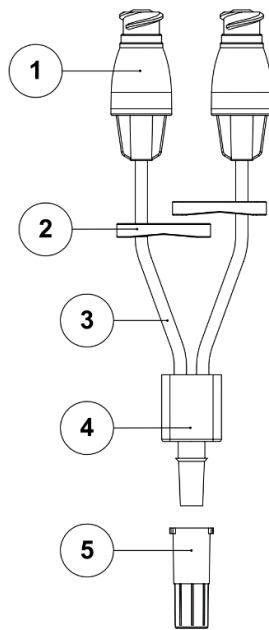

Advertências:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto.
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto.
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado.
- Não usar agulhas ou cânulas de qualquer tipo para acessar o Conector Valvulado.
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.

Legenda:

1 – Conector Fêmea Valvulado Neutro Livre de Agulha: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas junto a outros dispositivos providos de luer macho com mesmo padrão de fabricação. Possui válvula de silicone grau médico, permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro.

2 – Clamp Corta-Fluxo: Permite interromper e reiniciar imediatamente o fluxo de infusão da solução sempre que necessário.

3 – Tubo flexível e transparente: Possibilita avaliar e monitorar visualmente a administração da solução e estabilizar perfeitamente todo o Sistema de Infusão preservando assim a integridade do Acesso Venoso.

4 – Conector Multivia-2 Luer Slip Macho: Fabricado de acordo com ABNT NBR/ISO 594:2003, promove conexões seguras e precisas entre o Sistema de Infusão e outros dispositivos providos de luer fêmea com mesmo padrão de fabricação.

5 – Protetor Luer Lock Fêmea com Filtro: Provido de filtro de ar com membrana hidrófoba, permite a eliminação do ar ao mesmo tempo que retém o fluido no interior do produto.

Anvisa: 81516739004

Modelo do produto: 060301

Farm. Responsável: Cristiane S. S Mattos – CRF-BA 4139

INFUSÃO HOSPITALAR

Av.:Deputado Luís Eduardo Magalhães,Km 523,S/Nº - Bairro Subaé
Feira de Santana - BA - Brasil - CEP 44079-002
Tel.:+55 75 3626-7521 - E-mail:infusao@infusaohospitalar.com.br