


INDICADO PARA INFUNDIR E/ OU ASPIRAR FLUÍDOS EM SISTEMA FECHADO, DISPENSA O USO DE AGULHAS, CÂNULAS, OCLUSORES E TAMPAS PROTETORAS.

LEGENDA:

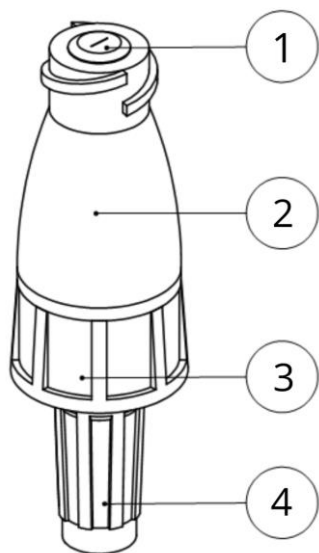

1. SEPTO DE SILICONE GRAU-MÉDICO: Permite manter o Sistema de Infusão sempre fechado e seguro, é provido de mecanismo de ação que abre automaticamente quando conectado e fecha automaticamente ao ser desconectado a outros Dispositivos providos de Luer Macho padrão NBR ABNT/ISO 594:2003 (partes 1 e 2).

2. LUER LOCK FÊMEA VALVULADO: Tem a finalidade de firmar o "Septo de Silicone Grau-Médico" junto ao "Luer Lock Macho Valvulado", sua parte Luer Fêmea permite conexões seguras e precisas a outros Dispositivos providos de Luer Macho padrão ABNT NBR/ISO 594:2003 (partes 1 e 2).

3. LUER LOCK MACHO VALVULADO: Tem a finalidade de unir o "Septo de Silicone Grau-Médico" e o "Luer Lock Fêmea Valvulado", formando assim o "Conector Valvulado Neutro para Cateter". Sua parte Luer Macho permite conexões precisas e seguras a outros Dispositivos providos de Luer Fêmea padrão ABNT NBR/ISO 594:2003 (partes 1 e 2).

4. PROTETOR LUER LOCK MACHO: Tem a finalidade de manter íntegro e estéril a parte Luer Macho do Conector Valvulado Neutro para Cateter, até o momento de uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Totalmente transparente.
- Suporta 600 ativações em 7 dias.
- Vazão de Fluxo:
 - Gravitacional: 200mL/minuto
 - Pressão (bomba): 600mL/minuto.
- Tamanho: 2,7 x 1,2cm.
- Livre de: Metais, BPA (Bisfenol A), DEHP, Látex e PVC.
- Compatível com Álcool, Clorexidina, Citostáticos, Hemoderivados e Lipídios.
- Compatível com conexões Luer Slip, Luer Lock e Spin Lock.
- Compatível com RM e TC.
- Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Filme Termoplástico.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Validade 60 meses
- Volume do Flushing: 0,5mL.
- Volume de Priming – espaço morto: 0,04 mL.
- Deslocamento: Neutro.
- Pressão em linha: 400psi.
- Peso: 1,53 gramas.

ADVERTÊNCIAS:

- Higienizar as mãos antes e após manipular o produto;
- Usar técnica asséptica para abertura da embalagem e manipulação do produto;
- Produto de uso único, proibido reprocessar, após o uso descartar em local apropriado;
- Não utilizar o produto com validade vencida ou embalagem violada.
- Não utilizar agulhas e/ ou cânulas metálicas ou de qualquer outro tipo para acessar o Conector Valvulado Neutro para Cateter, o uso de tais produtos danificará o Septo de Silicone Grau-Médico e consequentemente o produto em seu uso e finalidade, obrigando seu descarte.

CÓDIGO	MODELO COMERCIAL
060298	CONECTOR VALVULADO NEUTRO PARA CATETER PLLM

ANVISA: 81516739005

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Cristiane S. dos S. Mattos – CRF-BA-4139

REFERÊNCIA NORMATIVA:

- ABNT NBR ISO 594 - 1:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 1: Requisitos gerais.
- ABNT NBR ISO 594 - 2:2003 - Montagem cônica com conicidade de 6% (Luer) para seringas, agulhas e outros equipamentos médicos - Parte 2: Montagem fixa.
- ABNT NBR ISO 80369 - 7:2022 - Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases para aplicação em saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravasculares ou hipodérmicas.
- ABNT NBR ISO 8536 - 4:2011 - Equipamento de infusão para uso médico - Parte 4: Equipos de infusão para uso único, alimentação por gravidade.