

Descrição do produto	Confeccionado em silicone grau médico, com flexibilidade suficiente para a formação de um laço “loop”, possui uma região central maciça para sustentação do intestino exteriorizado e 3 orifícios a cada lado de 0,5cm a partir da parte central permitindo pontos de fixação na pele do paciente de acordo com as dimensões do estoma exteriorizado. Apresenta extremidades tubulares permitindo melhor ajuste e fixação do conector confeccionado em polietileno que compõe o produto. Produto isento de látex.
Componentes	1 Haste em Silicone grau médico com 6 furos
	1 Conector loopcolon em polietileno
	1 Régua
Embalagem primária	Papel Grau cirúrgico
Identificação e rastreabilidade	Seguindo critérios da RDC nº665/2022

Indicação	Indicado para estomas em alça, proporcionando mais conforto, segurança, menos riscos de lesões cutâneas e complicações pós-cirúrgicas, sendo utilizado exclusivamente por profissionais especializados e capacitados da área médico-hospitalar, segundo as normas e práticas hospitalares.
Esterilização	Esterilizado pelo processo de Óxido de etileno.
Validade	Validade de 3 anos a partir da data de fabricação do lote desde que a embalagem não tenha sido violada ou danificada.
Cuidados	Artigo Médico Hospitalar – Destruir após o uso – Uso Único – Proibido Reprocessar – Estéril.
Empilhamento	Máximo de 6 caixas de embarque

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Instruções de uso	O médico cirurgião deverá demarcar na pele, a área para a realização do estoma em alça. Após a demarcação, o cirurgião deverá realizar uma pequena perfuração no mesentério correspondente ao segmento do intestino que será exteriorizado. Após a incisão da área demarcada e exteriorização do segmento intestinal determinado, o médico cirurgião deverá introduzir o Loopcolon® pelo orifício perfurado do mesentério. Mantenha o centro do Loopcolon® (parte central mais rígida) coincidindo com a região posterior do intestino exteriorizado. Após este procedimento, fixar o Loopcolon® na pele por meio dos orifícios perfurados de acordo com o tamanho do estoma, utilizando fios de mononylon 3-0 ou 4-0. Posterior a maturação do estoma, aproximamos as extremidades do Loopcolon® realizando a junção com o conector para a formação do loop. O tubo poderá ser cortado nas extremidades de acordo com o tamanho do estoma exteriorizado. Para a remoção do Loopcolon® basta retirar os pontos de fixação na pele, cortando um dos lados e puxando suavemente para fora.
Classificação fiscal	3006.9190



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Código de barras

7898430465598	Loopcolon ® - 1 unidade
7898430465604	Loopcolon ® - 40 unidades