



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº PÁGINA
1 de 2

DATA REVISÃO
04/07/2023

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO

Descrição: invólucro em SMS 100% Polipropileno, utilizado como embalagem para esterilização em autoclave (calor úmido).

Indicação: invólucro, é um SMS usado para acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter o produto, envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.



2 – INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição do Invólucro: SMS 100% Polipropileno

Gramatura: 40g, 45g, 50g, 55g e 60g

Cor: Azul / Verde / Branco

Registro Anvisa Isenta de registro Anvisa conforme nota técnica N° 218/2020/SEI/GEMAT/GGTPS/DIRE3/ANVISA

Tamanho: 0,40mx0,40m/ 0,50m/0,50m/ 0,60mx0,60m/ 0,80m x0,80m/ 0,90m x 0,90m/ 1,0m x 1,0m/ 1,20m x 1,20m (40g)

0,40mx0,40m/ 0,50m/0,50m/ 0,60mx0,60m/ 0,75x0,75m/ 0,80m x0,80m/ 0,90m x 0,90m / 1,0m x 1,0m/ 1,20m x 1,20m/ 1,40mx1,40m/ 1,60m x1,60m (50g) 0,40mx0,40m/ 0,50m/0,50m/ 0,60mx0,60m/ 0,80m x0,80m/ 0,90m x 0,90m / 1,0m x 1,0m/ 1,20m x 1,20m/ 1,40mx1,40m/ 1,60m x1,60m (60g) Leve – 40g / Pesado – 50g / Super Pesado – 55 - 60g

Classificação de risco: I – Baixo risco

Unidades por pacote: 40 unidades / 80 unidades / 160 unidades



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Nº PÁGINA
2 de 2

DATA REVISÃO
04/07/2023

4 - FINALIDADE

O Invólucro para esterilização é uma embalagem com a finalidade de esterilizar produtos para saúde: o invólucro que permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de microrganismos, preservando o produto interno e garantindo a esterilidade do mesmo.

5 – INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir o invólucro para esterilização em uma superfície plana.
2. Posicionar a caixa de instrumental no centro do invólucro;
3. Puxar as pontas para fechamento;
4. Fechar com fita adesiva;
5. O produto está pronto para ser esterilizado;
6. Após o uso descartar em local apropriado.

6 – PRAZO DE VALIDADE

36 meses, a partir da data de fabricação.

7 – CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em local limpo, livre de umidade, arejado e em temperatura que variam de 4°C a 32°C, sempre dentro da sua embalagem original. Evitar exposição direta ao calor, luz e umidade entre 10 – 90%

8 - PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças.
Armazenar em local seco.
Descartar em local apropriado.
Produto não estéril.
O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada ou úmida.