

Cure Ultra®

Cateter Urinário Intermittente Masculino



Descrição

O Cateter Urinário Intermittente **Cure Ultra®** Masculino é um sistema de cateter aberto pré-lubrificado que permite a conveniência do paciente quando o cateterismo é necessário fora de casa.

Marca

Cure®

Composição do Produto

- **Ponta:** Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- **Tubo:** Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- **Conector:** Cicloexanona
- **Funil:** Polietileno Cloreto de Vinila (PVC)
- **Gel Lubrificante:** Lubrajel MG (lubrificante transparente, solúvel em água), composto por: glicerina, água, propileno glicol, poliacrilato de sódio, ácido poliacrílico, metilparabeno e propilparabeno.

Características e Ações do Produto

Após ser inserido pelo orifício corporal, uretra, assim que os ilhoses presentes na ponta do cateter atingirem o interior da bexiga, a urina passará a fluir pelo interior (lúmen) do tubo do cateter até sair pelo funil.

Recomendações de Uso

Como o Cateter Urinário Intermittente Cure Ultra Masculino não inclui dispositivo coletor, este deverá ser usado para permitir que a urina flua diretamente para um vaso sanitário ou outro sistema de coleta.

Advertências

- Contate um profissional da saúde se não houver fluxo de urina ou ocorrerem outras complicações durante ou após o uso (por exemplo, dor, inserção ou remoção difícil, sangramento, sinais de infecção do trato urinário ou corrimento).

Cure Ultra®

Cateter Urinário Intermitente Masculino

- O fabricante recomenda o **USO ÚNICO** deste produto, não reutilize ou reinsira o dispositivo. Isso pode levar a um aumento do risco de infecção, transmissão de vírus/bactérias, sangramento, dano tecidual ou dor;
- A esterilidade é garantida, salvo nos casos em que a embalagem selada esteja danificada ou seja aberta antes do uso. Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta antes do uso e descarte o dispositivo de acordo com os regulamentos locais;
- O cateter deve ser utilizado imediatamente após ser removido da embalagem;
- O cateter é lubrificado e pronto para uso assim que retirado da embalagem. O cateter nunca deve ser novamente lubrificado;
- Se durante a utilização deste dispositivo ou como resultado da sua utilização ocorrer um incidente grave, comunique-o ao detentor do registro e à autoridade competente.
- Não utilize em conjunto com irrigação ou instilação.

Método de Esterilização	Registro Sanitário	Prazo de Validade	Cuidados de Conservação
Óxido de Etileno	Notificação ANVISA Nº 80523020097	3 anos	Armazenar o produto dentro da embalagem original, lacrada e em temperatura ambiente, com o range de temperatura de 4° a 30°C.

ICC	BrasÍndice	EAN	SIMPRO	Características		Unidades por caixa
				Ponta do Cateter	Tamanho	
510811	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Coudé	10	1
510813	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Coudé	12	1
510815	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Coudé	14	1
510817	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Coudé	16	1
510819	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Coudé	18	1
510809	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	08	1
510810	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	10	1
510812	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	12	1
510814	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	14	1
510816	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	16	1
510818	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Reta	18	1

Cure Ultra®

Cateter Urinário Intermitente Masculino

**Fabricante**

Convatec Limited -
Reino Unido
Convatec Inc. - EUA

**Responsável Técnico**

Carla Viotto Belli
CRF-SP nº 16.715

**Detentor do
Registro/Notificação**

Convatec Brasil Ltda.
CNPJ: 09.603.161/0001-
44

**Atendimento ao
Cliente**

0800-7276-115

**convatec**
— forever caring —

www.convatec.com
FT-CCC18
V0

Para obter mais informações sobre nossos produtos, entre em contato com seu representante de vendas da ConvaTec.

Versão impressa não controlada e informações sujeitas a alterações.

As imagens ilustram apenas exemplos dos produtos e podem não contemplar todos os modelos disponíveis nesse registro.

Todas as marcas e logotipos são propriedade do Grupo ConvaTec.