



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



Frasco de Alimentação enteral 300 ml Imax

Descrição: O frasco de alimentação enteral é fabricado em 100% polietileno. Possui tampa rosqueada, alça de sustentação e escala graduada nos dois sentidos. As tampas dos frascos também são fabricadas com polietileno atóxico, de baixa densidade, na cor branca, as tampas possuem rosca, anel de segurança dentado internamente na borda para fixação no frasco, garantindo a inviolabilidade após o preparo da alimentação. As tampas dos frascos possuem terminação para fixação de equipo para administração da alimentação enteral.

Indicação: O Frasco para Alimentação enteral é indicado para preparação, acondicionamento e administração de alimentação enteral por sonda ou via oral em pacientes hospitalizados que estão impossibilitados de fazê-lo pelos processos normais.

Recomendações de Uso: o produto deve ser usado unicamente para o fim a que se destina, de uso único e descartado em local indicado após o uso.

- Escolha a correta medida do frasco para o paciente;
- Abra a embalagem de maneira asséptica;
- Coloque a alimentação enteral no frasco;
- Após preparação, colocar a tampa e rosquear até o fechamento total;
- No momento da administração conecte o equipo na tampa;
- Pendure o frasco em um suporte de cabeça para baixo;
- Realize o gotejamento de acordo com a orientação médica;

Apresentação comercial: Os Frascos são comercializados embalados individualmente em filme plástico e posteriormente acondicionados em caixas de papelão. São comercializados em frascos de 300 ml.

Composição: O Frasco para Alimentação Enteral é fabricado em material 100% polietileno de baixa densidade, transparente, atóxico e com graduação. A tampa rosqueada também é fabricada com 100% polietileno atóxico, de baixa densidade, na cor branca.

Precauções: manter sempre o produto em sua embalagem original. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora de seu prazo de validade. Descartar após o uso em local apropriado.

Advertência: Produto de uso único, proibido reprocessar.

Armazenamento: conservar o produto em sua embalagem original. O armazenamento deverá ser feito em local limpo e seco. Manter ao abrigo do calor e da luz solar direta.

Validade: válido por 5 anos a partir da data de fabricação.



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



Registro ANVISA: 81447810047



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.