



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



Filtro para retenção de fragmentos de cálculos urinários Urofrag

Descrição: O filtro urológico “**Urofrag**” fabricado pela Imax indústria e comércio tem a função de recuperar nas micções pequenos fragmentos de cálculos, após os pacientes serem submetidos á implosão de cálculos urinários por ultra-som.

Indicação: O filtro urológico “**Urofrag**” é indicado na recuperação de pequenos fragmentos de cálculos nas micções após os pacientes serem submetidos á implosão de cálculos urinários por ultra-som.

Recomendações de Uso: o produto deve ser usado unicamente para o fim a que se destina, de uso único e descartado em local indicado após o uso.

- Retire o filtro “**Urofrag**” da embalagem plástica e usa ló como filtro no momento das primeiras micções.

Apresentacao comercial: O Filtro Urológico “**Urofrag**” é embalado individualmente e posteriormente acondicionados em caixas de papelão.

Composição: O filtro urológico é composto por alça 100% polietileno injetado e tecido sintético como filtro 100% poliéster.

Dimensões: O filtro urológico é fornecido em tamanho único na forma não estéril.

Precauções: manter sempre o produto em sua embalagem original. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora de seu prazo de validade. Descartar após o uso em local apropriado.

Advertência: Produto de uso único, proibido reprocessar.

Armazenamento: conservar o produto em sua embalagem original. O armazenamento deverá ser feito em local limpo e seco. Manter ao abrigo do calor e da luz solar direta.

Validade: válido por 5 anos a partir da data de fabricação.

Isento de Registro ANVISA: O produto Filtro para controle de eliminação de cálculos Urinários não é considerado produto para saúde de acordo com a Resolução RDC nº 260/02 e Relação de Produtos não Considerados para Saúde, item B-74 – Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise.



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.