

SANKEY	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Versão: 00
	<b>LUVA RESTRITORA P/ CONTENÇÃO SANKEY</b>	Data da Emissão: 03/2022 Pág: 01

**Nome do Produto:** Luva Restritora para contenção Sankey

**Cadastro na ANVISA:** Dispensado de registro, cadastro e notificação.



### 1 - Descrição do Produto

A luva restritora de contenção Sankey é fabricada com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e conforto. O design ergonômico e os fechos aderentes ajustáveis permitem um ajuste fácil às mãos dos pacientes, proporcionando uma experiência sem desconfortos. A sua base é confortável, acompanha a anatomia da mão e permite mobilidade dos dedos e punho do paciente.

Produto fabricado no Brasil. Confeccionado em fibra sintética de poliamida, malha de algodão, fibra siliconada, passantes plásticos e fechos aderentes. Produto Não Estéril.

### 2 - Apresentação do Produto

- Embalados em embalagens plásticas. Contém 2 luvas.

	Neonatal	Pequeno	Médio	Grande
Largura	9,5 cm	10 cm	12 cm	16 cm
Altura	13 cm	15,5 cm	18 cm	19 cm

### 3 – Indicação de Uso/Finalidade

É indicada para evitar que pacientes acamados manipulem ou retirem as sondas, cateteres, curativos ou outros itens de forma involuntária, utilizada também para evitar lesões como arranhões, contribuindo para a integridade dos tratamentos e reduzindo riscos ao paciente. Ela pode ser utilizada em hospitais, clínicas, casas geriátricas e, até mesmo, em casa e ajuda a conter em casos de agressividade com familiares e cuidadores.

### 4- Instrução de Uso

Retirar as luvas de sua embalagem e abrir os fechos de fixação. Calçar a luva na mão do paciente e envolver o punho para promover a fixação passando o fecho aderente pelo passante plástico e finalizando com a fixação. Repetir a instrução ao calçar a outra mão.

### 5- Limpeza e Higienização

O produto não foi projetado para ser submetido a lavagens, deverá ser descartado conforme os protocolos das instituições e visualização de sujidades que comprometam o uso. É de uso individual.