

 PRODUTOS MÉDICOS LTDA	FICHA TÉCNICA FRASCO DE VIAS AÉREAS NOTIFICAÇÃO ANVISA: Nº10014160036	Nº18/21
		Elaboração: 07/2021 Emissão: 10/2023 Entrada em vigor: 10/2023 Revisão: nº06

FINALIDADE

Produto indicado para coleta asséptica das vias aéreas.

APRESENTAÇÃO



Código	Capacidade Volumétrica	Graduação	Tubos Da extensão	Conector da extensão Escalonado Medida de adaptação	Alça De Sustentação
41706	250 ml	10 ml	1º tubo nº24 0,80 cm	Interno 7,5 a 4,5 mm Externo 13,0 mm	Comprimento 1,50m
41700	500 ml	10 ml até 200ml 50 ml de 250 até 500ml			
41701	1.000 ml	50 ml			
41702	2.000 ml	50 ml			
41703	3.500 ml	100 ml	1º tubo nº24 0,80 cm		
			1º tubo nº28 1,20 m		

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

- ✓ Produto não estéril, embalado individualmente em embalagem plástica;
- ✓ Frasco, tubos, alça: fabricados em PVC atóxico;
- ✓ Tampa com duas saídas e conector: fabricados em polietileno de alta densidade atóxico;
- ✓ Anel de vedação: em EVA;
- ✓ Válvula: fabricada em polipropileno;
- ✓ Pinça: fabricada em nylon natural.

INSTRUÇÕES DE USO

- ✓ Verificar a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto, abrir a embalagem assepticamente;
- ✓ Observar se o produto atende as necessidades do paciente;
- ✓ Conectar o tudo de extensão ao dreno que está em contato com o paciente;
- ✓ Conectar o outro tudo no coletor rede vácuo que está afixado na parede;
- ✓ Ao notar que o reservatório atingiu o nível máximo, substitua por outro coletor;
- ✓ No caso do paciente não mais necessitar do produto retirar e descartar.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS/CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

- ✓ Artigo médico hospitalar de uso único;
- ✓ Proibido reprocessar;
- ✓ Isento de látex;
- ✓ Destruir após uso;
- ✓ Descartar em local para materiais potencialmente contaminados;
- ✓ O produto só pode ser instalado por profissional habilitado;
- ✓ Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou o prazo de validade estiver vencido;
- ✓ Não se tem relatos de nenhuma queixa técnica ou reclamação causada pelo uso do produto, quando utilizado de acordo com as instruções de uso e para a finalidade a que se destina;
- ✓ Validade 3 anos a partir da data de fabricação.

ARMAZENAMENTO / TRANSPORTE

- ✓ Armazenar e transportar em local limpo, livre de umidade ou contaminação e em temperatura ambiente.

Fabricante: CPL Medical's Produtos Médicos Ltda

CNPJ 43.512.870/0001-52 Indústria Brasileira

Rua Vieira Portuense, 760 - CEP 04347-080 - Jardim Oriental - São Paulo - SP

Responsável Técnico: Dr. Fabio Luiz Silva CRBM-SP 3940

Tel: (11) 5015-1000 SAC (11) 5011-7263 (11) 93235-3355

cplmedicals@cplmedicals.com.br

www.cplmedicals.com.br

Indústria genuinamente nacional sinônimo de entrega garantida.