

Cutimed® Siltec® Sorbact® e Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum

Curativo antimicrobiano para feridas superficiais



Descrição Cutimed® Siltec® Sorbact®:

Curativo antimicrobiano composto por camada de contato com a ferida em malha de acetato de Cloreto Dialquil Carbamóil (DACC), uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas contaminadas, colonizadas ou infectadas. Espuma de poliuretano absorvente de 5mm de espessura e com partículas superabsorventes de poliácido, filme de poliuretano impermeável à água e microrganismos e com alta permeabilidade à vapores úmidos, bordas adesivas em silicone. Embalagem estéril.

Descrição Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum:

Curativo antimicrobiano composto por camada de contato com a ferida em malha de acetato de Cloreto Dialquil Carbamóil (DACC), uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas contaminadas, colonizadas ou infectadas. Espuma de poliuretano absorvente de 5mm de espessura e com partículas superabsorventes de poliácido, filme de poliuretano impermeável à água e microrganismos e com alta permeabilidade à vapores úmidos, bordas adesivas em silicone e desenho exclusivo para melhor adequação em região sacra. Livre de látex. Embalagem estéril.

Modo de ação da Tecnologia DACC:

O modo de ação é baseado no princípio físico da interação hidrofóbica. Partículas hidrofóbicas (repelentes à água) naturalmente se unem em um ambiente úmido. Os microrganismos que podem prejudicar o processo de cicatrização das feridas também possuem características hidrofóbicas e, portanto, ligam-se de maneira irreversível às fibras do curativo Cutimed® Sorbact®. Exemplos comuns são: bactérias gram-positivas, tais como *Staphylococcus aureus*, MRSA ou *Streptococcus*; espécies gram-negativas, tais como *E. coli* e *Pseudomonas aeruginosa*, e fungos como a *Candida albicans*.

Atração física. O jeito Sorbact®

Bactérias e fungos são naturalmente hidrofóbicos (repelentes de água). O princípio Sorbact® se aproveita disso.



Indicações:

Indicado para todos os tipos de feridas superficiais com baixo, moderado ou alto exsudato, limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas, independentemente da sua etiologia, tais como úlceras venosas ou arteriais, úlceras de pressão, gangrenas diabéticas, incisões cirúrgicas, enxertos de pele, lacerações e abrasões. O curativo pode ser trocado diariamente ou permanecer no local por até 7 dias. Em feridas que mostram sinais de infecção o curativo pode ser trocado com maior frequência. Esterilizado por Óxido de Etileno.

As apresentações Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum são indicadas para lesões superficiais em região sacral.

Advertências e Precauções:

Cutimed® Sorbact® é embalado para uso único. Não reutilize ou reesterilize pois existe o risco de transmissão de fluidos corpóreos e tecidos contaminados entre os pacientes; Não use se o envelope estiver aberto ou danificado; Não use com soluções oxidantes como hipoclorito e peróxido de hidrogênio; Cutimed® Siltec® Sorbact® e Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum não são destinados a serem cortados. Evite a sobreposição de dois ou mais curativos da família de produtos Cutimed® Siltec® Sorbact®, sempre escolha um curativo que é apropriado para o tamanho da ferida; Para uso externo somente; Não use em combinação com produtos gordurosos, como pomadas, cremes ou soluções, pois eles podem interferir na eficácia da ligação entre o curativo e os microrganismos; Não use Cutimed® Siltec® Sorbact® em feridas secas; Não utilize

Cutimed®

em pacientes com sensibilidade conhecida aos componentes do curativo; A camada verde do curativo deve sempre ser aplicada em contato direto com a área da ferida permitindo que os microrganismos se liguem ao curativo; Remova o curativo antes de realizar terapias por radiação; Em feridas que apresentam sinais clínicos de infecção, uma inspeção mais frequente do curativo é indicada. Nestes casos, um tratamento sistêmico apropriado deve ser considerado.

Contraindicações:

Não há contraindicações conhecidas.

Composição do produto:

Espuma de poliuretano absorvente de 5mm de espessura e com partículas superabsorventes de poliacrilato, revestida de malha de acetato com Cloreto de Diaquil Carbomol (DACO), filme de poliuretano permeável, bordas de 2cm em silicone e filme de liberação de polietileno transparente.

Características	Benefícios
Tratamento de feridas agudas e crônicas	Auxilia no gerenciamento da infecção, sendo indicado para o gerenciamento das feridas
Espuma de poliuretano com borda de silicone	Gerenciamento do exsudato e visualização da saturação pela película de poliuretano permeável.
Não há contra-indicação	Uso contínuo em adulto, crianças, neonatos e mulheres grávidas
Antimicrobiano sem agentes químicos	Não possui efeitos colaterais ou riscos de citotoxicidade, visto que o mecanismo de ação é por atração física.
Tamanhos diversos	Formatos anatômicos para melhor fixação anatômica em feridas superficiais, formato de sacrum específicos para lesões sacrais.

Modo de Uso:

1. Limpe a ferida conforme protocolo. Se necessário, limpe a ferida com o Cutimed® Sorbact® Round Swab sob a superfície úmida da ferida para remover a contaminação microbiana superficial, realizando um desbridamento mecânico.
2. Certifique-se que a pele em torno da ferida esteja seca.
3. Selecionar um curativo adequado para o tamanho da ferida. Para obter melhores resultados, o Cutimed® Siltec® Sorbact® ou Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum deve ultrapassar as bordas do leito da ferida em, pelo menos 2cm.
4. Abra a embalagem e pegue o curativo. Garanta a esterilidade.
5. Retire a película protetora e aplique o lado verde do curativo sobre a ferida superficial.
6. Evite alongar o curativo.
7. Dependendo do local da ferida pode ser apropriado aplicar um curativo de fixação adicional;
8. Cutimed® Siltec® Sorbact® ou Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum devem ser trocados com a frequência necessária de acordo com as condições da ferida. Assim como todos os curativos absorventes, a verificação da ferida é necessária para assegurar se a ferida está seca e se o curativo não aderiu à ferida. O curativo deve ser trocado quando a saturação do fluido da ferida se tornar visível. O tempo máximo de permanência do mesmo curativo não deve ser superior a 7 dias.
9. Cuidadosamente remova qualquer curativo de fixação adicional e gentilmente remova o Cutimed Siltec Sorbact ou Cutimed Siltec Sorbact Sacrum da ferida e descarte;
10. Se necessário, limpe a ferida antes da aplicação de um novo curativo.

Transporte e Armazenagem: Armazenar Cutimed® Siltec® Sorbact® / Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum em local seco. Não expor à luz direta do sol

Formas de apresentação do produto médico: O produto é embalado unitário, em papel grau cirúrgico. O produto então pode ser comercializado em cartuchos de papel cartão contendo 10 unidades, em tamanhos 7,5cmx7,5cm / 12,5cmx12,5cm / 15,0cmx15,0cm e 17,5cm x 17,5 cm / 22,5 cm x 22,5 cm com 5 unidades. O produto é embalado unitário em formato de sacral, em papel grau cirúrgico. O produto então

pode ser comercializado em cartuchos de papel cartão contendo 05 unidades, em tamanhos 17,5cmx17,5cm / 23,0cmx23,0cm

Esterilização: Estéril por Óxido de Etileno

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação



Fabricação: BSN Medical – Alemanha

Registro na ANVISA: 10224000081



Validade do Registro: 12/01/2025

NCM: 30.05.9090

Cutimed® Siltec® Sorbact®

	Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
	73251-00	309924	73251-00	7,5cm X 7,5cm	Caixa c/ 10 unid.
	73251-01	271337	73251-01	12,5cm X 12,5cm	Caixa c/ 10 unid.
	73251-02	271338	73251-02	15,0cm X 15,0cm	Caixa c/ 10 unid.
	73251-03	271339	73251-03	17,5cm X 17,5cm	Caixa c/ 05 unid.
	73251-04	271340	73251-04	22,5cm X 22,5cm	Caixa c/ 05 unid.

Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum

	Código NART	Código Simpro	Código Brasíndice	Apresentação	Quantidade
	73251-05	309927	73251-05	17,5cm x 17,5cm	Caixa c/ 05 unid.
	73251-06	271342	73251-06	23,0cmx23,0cm	Caixa c/ 05 unid.





Obs.: Em feridas que mostram sinais de infecção, o curativo deve ser trocado com maior frequência entre 24 e 72 horas. Em feridas secas, o curativo pode permanecer por até 7 dias, dependendo das condições da ferida.

Legenda:

Profundidade da Ferida

-  Superficial
-  Cavitária
-  Superficial + Cavitária

Nível do Exsudato

-  Seco a baixo
-  Baixo a moderado
-  Moderado a alto
-  Alto a excessivo

Tipo de Tecido

-  Necrótico
-  Esfacelos (liquefação)
-  Infecção
-  Granulação
-  Epitelização