



Equipo Macrogotas Simples Descarpack

DESCRIÇÃO

O **Equipo Macrogotas Simples Descarpack** é um equipo para infusão gravitacional, desenvolvido para administração de soluções parenterais, intermediando a ligação do dispositivo venoso periférico ao recipiente que contém o líquido a ser fundido.

Confeccionado em PVC flexível e incolor, o **Equipo Macrogotas Simples Descarpack** é estéril, atóxico, de uso único e livre de látex. Conta com câmara gotejamento e tubo com extensão de 1,5 m.

O **Equipo Macrogotas Simples Descarpack** possui certificação do INMETRO.

PRODUTO



Cadastro Anvisa: 10330660054

Fabricante: Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

INDICAÇÃO DE USO

O **Equipo Macrogotas Simples Descarpack** foi especialmente desenvolvido para a administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais, clínicas, laboratórios.

Não possui filtro de fluido. Recomendado para a administração de medicamentos que possuam macropartículas (Portaria INMETRO n.º 493 de 02/10/2015).

MODELOS DISPONÍVEIS

O **Equipo Macrogotas Simples Descarpack** é disponível no modelo com regulador de fluxo, ponta perfurante com protetor e conector slip universal.

COMPOSIÇÃO

- ❖ **Tubo:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- ❖ **Câmara de Gotejamento:** Cloreto de Polivinila (PVC);
- ❖ **Ponta Perfurante:** Cloreto de Polivinila (PVC) rígido;
- ❖ **Regulador de Fluxo:** Polipropileno;
- ❖ **Conector Slip Universal:** Polipropileno.

VALIDADE

05 (cinco) anos após data de fabricação/esterilização.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Modelo	Código	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Qtde. Caixa Master
Macrogotas simples	0412201	1 unidade	25 unidades	500 unidades

INSTRUÇÕES DE USO

- ❖ Avaliar as condições da embalagem e prazo de validade, utilizar somente se a embalagem estiver intacta;
- ❖ Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
- ❖ Retirar a tampa protetora da ponta perfurante e conectar ao soro;
- ❖ Retirar a tampa protetora do conector slip universal e conectar ao dispositivo do paciente;
- ❖ Após a utilização descartar em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES

- ❖ Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada;
- ❖ Produto Médico Hospitalar de Uso Único;
- ❖ Proibido reprocessar;
- ❖ Esterilizado por Óxido de Etileno;
- ❖ Destruir após o uso;
- ❖ Após o uso descarte em local apropriado

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.