

# Power PICC BD™

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informações gerais

#### Indicação de uso:

O cateter Power PICC é indicado para o acesso periférico, de curto ou longo prazo ao sistema venoso central para tratamento intravenoso e injeção mecânica de meio de contraste, permitindo ainda a monitoramento da pressão venosa central. Também indicado para a obtenção de amostras de sangue, infusão ou terapêutica.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O PowerPICC é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha/introdutor, 01 Fita métrica, 01, 02 ou 03 Tampas de extremidade (dependendo do n° lúmen), 01 Bisturi com dispositivo de segurança, 01 Microintrodutor, 01 Fio-guia.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| Power PICC™ |                              |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |       |       |
|-------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|-------|
| Catálogo    | Descrição                    | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L     | A     |
| 3175118     | POWER PICC 5 Fr MONO LÚMEN   | 00801741027666 | 80689090188 | 1         | 0.18      | 0.1629  | 3.00         | 31.80 | 19.10 |
| 3275118     | POWER PICC 5 Fr DUPLO LÚMEN  | 00801741027918 | 80689090190 | 1         | 0.17      | 0.1548  | 8.64         | 25.40 | 16.50 |
| 3276118     | POWER PICC 6 Fr DUPLO LÚMEN  | 00801741027994 | 80689090190 | 1         | 0.17      | 0.1548  | 3.00         | 17.80 | 30.50 |
| 3386105     | POWER PICC 6 Fr TRIPLO LÚMEN | 00801741028212 | 80689090189 | 1         | 0.18      | 0.1629  | 5.30         | 44.50 | 16.50 |

#### Descrição

##### PowerPICC 5Fr Mono lúmen Código: 3175118

Cateter central de longa permanência e inserção periférica, de uso único, proibdo reesterilização, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento, mono lúmen. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, suporta 300 PSI (2068 kPa) de pressão, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com sistema de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, esterilizado por óxido de etileno, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### PowerPICC 5Fr Duplo lúmen Código: 3275118

Cateter central de longa permanência e inserção periférica, de uso único, proibdo reesterilização, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento, mono lúmen. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, suporta 300 PSI (2068 kPa) de pressão, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com sistema de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, esterilizado por óxido de etileno, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### PowerPICC 6Fr Duplo lúmen Código: 3276118

Cateter central de longa permanência e inserção periférica, de uso único, proibdo reesterilização, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento, duplo lúmen. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, suporta 300 PSI (2068 kPa) de pressão, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com sistema de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, esterilizado por óxido de etileno, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### PowerPICC 6Fr Duplo lúmen Código: 3386105

Cateter central de longa permanência e inserção periférica, de uso único, proibdo reesterilização, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento, triplo lúmen. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, suporta 300 PSI (2068 kPa) de pressão, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com sistema de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, esterilizado por óxido de etileno, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.



# Power PICC BD™ 3CG

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informação geral

#### Indicação de uso:

O cateter Power PICC 3CG® é indicado para o acesso periférico, de curto ou longo prazo, ao sistema venoso central para tratamento intravenoso e injeção mecânica de meio de contraste, permitindo ainda a monitoramento da pressão venosa central. Também indicado para a obtenção de amostras de sangue, infusão ou terapêutica.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O PowerPICC 3CG® é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha/introdutor, 01 Fita métrica, 01, 02 ou 03 Tampas de extremidade (dependendo do nº lúmen), 01 Bisturi com dispositivo de segurança, 01 Microintrodutor, 01 Fio-guia, aleta e subconjunto de condução ECG, protetor do sensor TLS, estilete Sherlock 3CG, protetor do controle remoto e bandas elásticas.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| Power Picc™ 3CG |                                 |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |             |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------------|
| Catálogo        | Descrição                       | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido |              |             |
| 4174118         | POWER PICC 3CG 4Fr MONO LÚMEN   | 00801741138980 | 80689090113 | 1         | 0.73      | 0.6534  | 8.60         | 26.70 27.90 |
| 4175118         | POWER PICC 3CG 5Fr MONO LÚMEN   | 00801741139482 | 80689090113 | 1         | 0.73      | 0.6534  | 8.60         | 26.70 27.90 |
| 4275118         | POWER PICC 3CG 5Fr DUPLO LÚMEN  | 00801741139529 | 80689090102 | 1         | 0.75      | 0.6732  | 8.90         | 26.70 27.90 |
| 4375118         | POWER PICC 3CG 5Fr TRIPLO LÚMEN | 00801741139543 | 80689090110 | 1         | 0.001     | 0.0009  | 8.60         | 25.40 27.90 |
| 4386118         | POWER PICC 3CG 6Fr TRIPLO LÚMEN | 00801741140068 | 80689090110 | 1         | 0.75      | 0.6732  | 10.00        | 27.80 27.90 |

#### Descrição

##### Cateter intravenoso 4Fr Mono-lúmen Código: 4174118 / RMS 80689090113

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso 5Fr Mono-lúmen Código: 4175118 / RMS 80689090113

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 5Fr duplo-lúmen Código: 4275118 / RMS 80689090102

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 5Fr Triplo-lúmen Código: 4375118 / RMS 80689090110

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, triplo lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 6Fr Triplo-lúmen Código: 4386118 / RMS 80689090110

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, triplo lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.



# Power PICC BD™ 3CG Solo

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informação geral

#### Indicação de uso:

O cateter Power PICC 3CG Solo é indicado para o acesso periférico, de curto ou longo prazo, ao sistema venoso central para tratamento intravenoso e injeção mecânica de meio de contraste, permitindo ainda o monitoramento da pressão venosa central. Também indicado para a obtenção de amostras de sangue, infusão ou terapêutica.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O PowerPICC 3CG Solo é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter com válvula proximal SOLO, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha/introdutor, 01 Fita métrica, 01, 02 ou 03 Tampas de extremidade (dependendo do nº lúmen), 01 Bisturi com dispositivo de segurança, 01 Microintrodutor, 01 Fio-guia, aleta e subconjunto de condução ECG, protetor do sensor TLS, estilete Sherlock 3CG, protetor do controle remoto e bandas elásticas.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| Power Picc™ 3CG SOLO |                                   |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|------|------|
| Catálogo             | Descrição                         | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L    | A    |
| 1194118              | POWER PICC SOLO 4Fr MONO LÚMEN    | 00801741034527 | 80689090162 | 1         | 0.34      | 0.302   | 0.10         | 0.10 | 0.10 |
| 1295118              | POWER PICC SOLO 5Fr DUPLO LÚMEN   | 00801741034633 | 80689090169 | 1         | 0.33      | 0.3     | 0.10         | 0.10 | 0.33 |
| 1395118Q             | POWER PICC SOLO 5Fr TRIPLO LÚMEN  | 00801741085727 | 80689090163 | 1         | 0.34      | 0.3042  | 0.10         | 0.10 | 0.10 |
| 1090000              | PEXTESION SET PARA POWERPICC SOLO |                |             |           |           |         |              |      |      |

#### Descrição:

##### Cateter intravenoso 4Fr Mono-lúmen Código: 1194118 / RMS 80689090162

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento, tecnologia da válvula proximal Solo², eliminando a necessidade de clampeamento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 5Fr duplo-lúmen Código: 1295118 / RMS 80689090169

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento, tecnologia da válvula proximal Solo², eliminando a necessidade de clampeamento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 5Fr Triplo-lúmen Código: 1395118Q / RMS 80689090163

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, triplo lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento, tecnologia da válvula proximal Solo², eliminando a necessidade de clampeamento. Velocidade máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico com estanho revestido de cobre que pode ser usado com um sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG, fornecendo informações em tempo real sobre a navegação e localização da ponta do cateter através da utilização de magnetos passivos e detecção de sinais elétricos cardíacos. Microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi seguro, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.



# Power PICC BD™ Small Veins

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informação geral

#### Indicação de uso:

O cateter Power PICC SV® é indicado para o acesso periférico, de curto ou longo prazo, do sistema venoso central para tratamento intravenoso e injeção mecânica de meio de contraste, permitindo ainda a monitoramento da pressão venosa central. Também indicado para a obtenção de amostras de sangue, infusão ou terapêutica.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O PowerPICC SV é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha/introdutor, 01 Fita métrica, 01, 02 ou 03 Tampas de extremidade (dependendo do nº lúmen), 01 Bisturi com dispositivo de segurança, 01 Microintrodutor, 01 Fio-guia, protetor do sensor TLS, protetor do controle remoto e bandas elásticas.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| Power Picc™ Small Veins |                                   |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |          | Medidas (cm) |       |       |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|-------|
| Catálogo                | Descrição                         | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido  | C            | L     | A     |
| 8173118                 | POWER PICC SV 3Fr MONO LÚMEN      | 00801741138935 | 80689090104 | 1         | 0.003     | 0.0027   | 8.90         | 27.90 | 27.90 |
| 8274118                 | POWER PICC SV 4Fr DUPLO LÚMEN     | 00801741139413 | 80689090117 | 1         | 0.003     | 0.0027   | 8.90         | 26.70 | 27.90 |
| 7173118                 | POWER PICC SV TLS 3Fr MONO LÚMEN  | 00801741138928 | 80689090118 | 1         | 0.00051   | 0.000459 | 4.35         | 2.55  | 0.50  |
| 7274118                 | POWER PICC SV TLS 4Fr DUPLO LÚMEN | 00801741139086 | 80689090116 | 1         | 0.004     | 0.0036   | 9.10         | 27.90 | 27.90 |

#### Descrição:

#### DESCRIPTIVOS – POWER PICC SV (Small Veins) sem tecnologia TLS (Tip Location System)

##### Cateter intravenoso 3Fr Mono-lúmen Código: 8173118 / RMS: 80689090104

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 3Fr x 45cm de comprimento, com fio-guia de 0,18" x 50cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Taxa máxima de infusão de 1mL/s, com identificação no respectivo lúmen. Cada kit contém: 01 cateter Power PICC SV 3Fr mono lúmen, 01 T-Lock, 01 dispositivo de estabilização de cateter StatLock, 01 seringa 12 cc, 01 agulha introdutora 21G x 7cm com dispositivo de segurança/safety, 01 microintrodutor para inserção guiada por USG, 01 bisturi seguro, 01 retenção de cateter, 01 fio guia, 01 fita métrica de papel, 01 tampa de extremidade. Embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter Intravenoso 4Fr duplo-lúmen Código: 8274118 / RMS: 80689090117

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento, com fio-guia de 0,18" x 50cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Taxa máxima de infusão de 2.5 mL/s, com identificação no respectivo lúmen. Cada kit contém: 01 cateter Power PICC SV 4Fr duplo lúmen, 02 T-Lock, 01 dispositivo de estabilização de cateter StatLock, 01 seringa 12 cc, 01 agulha introdutora 21G x 7cm com dispositivo de segurança/safety, 01 microintrodutor para inserção guiada por USG, 01 bisturi seguro, 01 retenção de cateter, 01 fio guia, 01 fita métrica de papel, 02 tampas de extremidade. Embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

#### DESCRIPTIVOS – POWER PICC SV (Small Veins) TLS (Tip Location System) BD®

##### Cateter intravenoso 3Fr TLS Mono-lúmen Código: 7173118/ RMS: 80689090118

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 3Fr x 45cm de comprimento, com fio-guia de 0,18" x 50cm e estilete TLS (Tip Location System) de 0,040" x 81,5 cm, o qual contém ímãs passivos que geram um campo magnético que pode ser detectado pelo Sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG® (registrado separadamente). Ambos em aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Taxa máxima de infusão de 1mL/s, com identificação no respectivo lúmen. Cada kit contém: 01 cateter Power PICC TLS SV 3Fr mono lúmen, 01 T-Lock, 01 dispositivo de estabilização de cateter StatLock, 01 seringa 12 cc, 01 agulha introdutora 21G x 7cm com dispositivo de segurança/safety, 01 microintrodutor para inserção guiada por USG, 01 bisturi seguro, 01 retenção de cateter, 01 fio guia, 01 fita métrica de papel, 01 tampa de extremidade e 01 cobertura plástica para o "sensor em Y". Embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso 4Fr TLS Duplo-lúmen Código: 7274118/ RMS: 80689090116

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento, com fio-guia de 0,18" x 50cm e estilete TLS (Tip Location System) de 0,040" x 81,5 cm, o qual contém ímãs passivos que geram um campo magnético que pode ser detectado pelo Sistema de Confirmação de Ponta Sherlock 3CG (registrado separadamente). Ambos em aço inoxidável e revestimento hidrofílico. Taxa máxima de infusão de 2.5 mL/s, com identificação no respectivo lúmen. Cada kit contém: 01 cateter Power PICC TLS SV 4Fr duplo lúmen, 02 T-Lock, 01 dispositivo de estabilização de cateter StatLock, 01 seringa 12 cc, 01 agulha introdutora 21G x 7cm com dispositivo de segurança/safety, 01 microintrodutor para inserção guiada por USG, 01 bisturi seguro, 01 retenção de cateter, 01 fio guia, 01 fita métrica de papel, 01 tampa de extremidade e uma cobertura plástica para o "sensor em Y". Embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.



# Power PICC BD™ Radiology

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informação geral

#### Indicação de uso:

O cateter Power PICC é indicado para o acesso venoso central para tratamento intravenoso e injeção mecânica de meio de contraste, permitindo ainda a monitoramento da pressão venosa central. Também indicado para a obtenção de amostras de sangue, infusão ou terapêutica.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O PowerPICC Radiology é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha/introdutor, 01 Fita métrica, 01, 02 ou 03 Tampas de extremidade (dependendo do nº lúmen), 01 Bisturi, 01 Microintrodutor, 01 Fio-guia composto em aço inoxidável e espiral em tungstênio banhado a ouro de 70 cm ou 135 cm.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| Power Picc™ |                                |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |       |       |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|-------|
| Catálogo    | Descrição                      | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L     | A     |
| 3174135     | POWER PICC RD 4Fr MONO LÚMEN   | 00801741027604 | 80689090144 | 1         | 0.22      | 0.198   | 37.00        | 21.00 | 2.00  |
| 3175135     | POWER PICC RD 5Fr MONO LÚMEN   | 00801741027673 | 80689090144 | 1         | 0.29      | 0.261   | 6.10         | 38.10 | 17.80 |
| 3276135     | POWER PICC RD 5Fr DUPLO LÚMEN  | 00801741028007 | 80689090144 | 1         | 0.21      | 0.189   | 43.00        | 25.00 | 1.00  |
| 3386135     | POWER PICC RD 6Fr TRIPLO LÚMEN | 00801741028281 | 80689090189 | 1         | 0.29      | 0.2574  | 8.60         | 26.00 | 16.50 |
| 3174155     | POWER PICC RD 4Fr MONO LÚMEN   | 00801741027611 | 80689090144 | 1         | 0.27      | 0.2448  | 3.60         | 38.10 | 15.20 |
| 3175155     | POWER PICC RD 5Fr MONO LÚMEN   | 00801741027680 | 80689090144 | 1         | 0.11      | 0.099   | 30.00        | 15.00 | 7.00  |
| 3276155     | POWER PICC RD 6Fr DUPLO LÚMEN  | 00801741028014 | 80689090144 | 1         | 0.22      | 0.198   | 42.00        | 25.50 | 1.00  |

#### Descrição:

**Cateter intravenoso 4Fr Mono-lúmen Código: 3174155 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 70cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 5Fr Mono-lúmen Código: 3175155 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 70cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 6Fr Duplo-lúmen Código: 3276155 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 70cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 6Fr Triplo-lúmen Código: 3386155 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, triplo lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 70cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

DESCRIPTIVOS – POWER PICC® RADIOLOGIA COM MICROINTRODUTOR BD FIO GUIA DE 135 CM DE COMPRIMENTO

**Cateter intravenoso 4Fr Mono-lúmen Código: 3174135 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 4Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 135cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 5Fr Mono-lúmen Código: 3175135 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, único lúmen, 5Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 135cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 6Fr Duplo-lúmen Código: 3276135 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 135cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

**Cateter intravenoso 6Fr Triplo-lúmen Código: 3386135 / RMS 80689090144**

De longa permanência, inserção periférica, Poliuretano Tecoflex biocompatível, com sulfato de bário radiopaco, desenho cônico reverso resistente à torção, triplo lúmen, 6Fr x 55cm de comprimento. Taxa máxima de infusão de 5mL/s, com identificação no respectivo lúmen, com estilete de aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor de 10cm para inserção guiada por USG, fio guia de 0,18" x 135cm em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, bisturi com lâmina em aço inoxidável, agulha introdutora de 21G, seringa de 12ml com sistema luer, dispositivo de estabilização de cateter StatLock®, fita métrica de papel, uma tampa de extremidade, estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.



# PowerGlide Pro™

## Cateter de linha média

### Informações gerais

#### Indicação de uso

O Cateter PowerGlide Pro™ Midline é inserido no sistema vascular do paciente, para uma utilização de curta duração (< 30 dias), para coletar amostras de sangue e administrar fluidos por via intravenosa. Estes cateteres podem ser utilizados em qualquer tipo de paciente, desde que se adequem à anatomia vascular do paciente e ao procedimento a realizar. O Cateter PowerGlide Pro™ Midline pode ser utilizado com sistemas de injeção com alto poder de infusão.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O cateter PowerGlide Pro™ Midline é fornecido em embalagem estéril e apirogênica, esterilizado por óxido de etileno. A embalagem contém 01 cateter de 18G (10 ou 08 cm), 20G (10 ou 08 cm) ou 22G (08 cm) e 01 dispositivo de estabilização StatLock.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| PowerGlide Pro Midline |                                 |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |      |      |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|------|------|
| Catálogo               | Descrição                       | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L    | A    |
| 6F122080               | PowerGlide Pro Midline 22G 8CM  | 00801741138638 | 80689099002 | 1         | 0,058     | 0,051   | 1,5          | 21,4 | 16   |
| 6F120080               | PowerGlide Pro Midline 20G 8CM  | 00801741138614 | 80689099002 | 1         | 0,058     | 0,052   | 1,47         | 21   | 15,4 |
| 6F120100               | PowerGlide Pro Midline 20G 10CM | 00801741138621 | 80689099002 | 1         | 0,058     | 0,052   | 1,47         | 21   | 16   |
| 6F118080               | PowerGlide Pro Midline 18G 8CM  | 00801741138591 | 80689099002 | 1         | 0,057     | 0,051   | 1,5          | 21   | 15,4 |
| 6F118100               | PowerGlide Pro Midline 18G 10CM | 00801741138607 | 80689099002 | 1         | 0,058     | 0,052   | 1,5          | 21   | 15,4 |
| SLP001CE               | Statlock Pro Midline            | 00801741218576 | 80689090191 | 1         | 0,0096    | 0,0086  | 4,0          | 16   | 17   |

#### Descrição:

##### Cateter intravenoso – PowerGlide Pro™ 18G >> 8cm Código: 6F118080

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, com a ponta reforçada. Constituído por uma agulha introdutora que possui um mecanismo passivo de segurança com fioguia integrado. Cateter de lúmen único, 18g x 8 cm de comprimento, com identificação no respectivo lúmen. Radiopaco, indicado para injeção rápida, Velocidade máxima de infusão de 7 ml/s e 325 PSI, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso – PowerGlide Pro™ 18G >> 10cm Código: 6F118100

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, com a ponta reforçada. Constituído por uma agulha introdutora que possui um mecanismo passivo de segurança com fioguia integrado. Cateter de lúmen único, 18g x 10 cm de comprimento, com identificação no respectivo lúmen. Radiopaco, indicado para injeção rápida, Velocidade máxima de infusão de 7 ml/s e 325 PSI, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso – PowerGlide Pro™ 20G >> 8cm Código: 6F120080

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, com a ponta reforçada. Constituído por uma agulha introdutora que possui um mecanismo passivo de segurança com fioguia integrado. Cateter de lúmen único, 18g x 8 cm de comprimento, com identificação no respectivo lúmen. Radiopaco, indicado para injeção rápida, Velocidade máxima de infusão de 5 ml/s e 325 PSI, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso – PowerGlide Pro™ 20G >> 10cm Código: 6F120100

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, com a ponta reforçada. Constituído por uma agulha introdutora que possui um mecanismo passivo de segurança com fioguia integrado. Cateter de lúmen único, 18g x 10 cm de comprimento, com identificação no respectivo lúmen. Radiopaco, indicado para injeção rápida, Velocidade máxima de infusão de 5 ml/s e 325 PSI, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso – PowerGlide Pro™ 22G >> 8cm Código: 6F122080

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, com a ponta reforçada. Constituído por uma agulha introdutora que possui um mecanismo passivo de segurança com fioguia integrado. Cateter de lúmen único, 18g x 8 cm de comprimento, com identificação no respectivo lúmen. Radiopaco, indicado para injeção rápida, Velocidade máxima de infusão de 2 ml/s e 325 PSI, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Statlock Pro Midline™ – Código SLP001CE

Dispositivo estéril para estabilização do cateter Midline PowerGlide Pro™ e dispositivos compatíveis, adesivo em espuma de polietileno, retentor em policarbonato, livre de látex, sachê preparatório de pele, embalado em material que promova barreira asséptica. Estéril em óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na ANVISA/MS nº: 806890



# Midline Provena™

## Cateter de linha média



### Informação geral

#### Indicação de uso:

Os cateteres Provena Midline estão indicados para acesso de curto prazo ao sistema venoso periférico, terapias intravenosas selecionadas, coleta de amostras de sangue e injeção com alto poder de infusão de meios de contraste. Estes cateteres podem ser utilizados em qualquer tipo de paciente, desde que se adequem à anatomia vascular do paciente e ao procedimento a ser realizado.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

Descrições do Provena Midline Mono Lúmen 3Fr e Duplo Lúmen 4Fr detalhadas ao lado.

### Apresentação e conteúdo

| BD Provena Midline™ |                                |                |             |           | QTD (un) |         |     | Peso (kg)    |      |  |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|-----|--------------|------|--|
|                     |                                |                |             |           |          |         |     | Medidas (cm) |      |  |
| Catálogo            | Descrição                      | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido | C   | L            | A    |  |
| S64153118           | Provena Midline Mono Lúmen     | 00801741154065 | 80689099007 | 150       | 0,820    | 0,740   | 44  | 26           | 5,50 |  |
| S64244118           | Provena Midline Duplo Lúmen 4F | 00801741154218 | 80689099005 | 1.400     | 0,111    | 0,0999  | 236 | 170          | 32,8 |  |

#### Descrição:

##### Cateter intravenoso Provena™ Midline 3Fr Mono-lúmen Código: S64153118

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, radiopaco. Possui um desenho cônico reverso resistente à torção, lúmen único, 3Fr x 20 cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 6 ml/s e 325 PSI, com identificação no respectivo lúmen, possui estilete em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com trava de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

##### Cateter intravenoso Provena™ Midline 4Fr Duplo-lúmen Código: S64244118

De curta permanência, indicado para terapias de até 29 dias (< 30dias), inserção periférica, Poliuretano biocompatível que diminui a rigidez em contato com a temperatura corporal, radiopaco. Possui um desenho cônico reverso resistente à torção, duplo lúmen, 4Fr x 20 cm de comprimento. Velocidade máxima de infusão de 6 ml/s e 325 PSI, com identificação no respectivo lúmen, possui estilete em aço inoxidável e revestimento hidrofílico, microintrodutor para inserção guiada por USG, fio guia de 0,46mm, bisturi com trava de segurança, cateter intravenoso agulhado e agulha introdutora de 21G, ambos com dispositivo de segurança/safety, compatível com sistema de estabilização sem sutura StatLock. Estéril, embalado em material que garanta a integridade do produto e abertura asséptica respeitando a legislação vigente. Produto embalado individualmente em papel grau cirúrgico.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda. CPNJ:  
21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273 Juiz de  
Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

| Catálogo                                                                                                                                                        | Descrição                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| S64153118                                                                                                                                                       | Provena Midline Mono Lúmen 3F |
| 1 Cateter Provena Midline™ Mono Lúmen 3F (1,14mm de diâmetro externo) x 20 cm, com estilete de reforço interno / Conjunto de fecho em T                         |                               |
| 1 Seringa 12 mL                                                                                                                                                 |                               |
| 1 Dispositivo de estabilização StatLock™ com protetor de pele Skin Protectant Prep Pad                                                                          |                               |
| 1 Cateter Introdutor IV Periférico de Segurança 20G (1,1mm de diâmetro externo x 45mm de comprimento)                                                           |                               |
| 1 Fita métrica                                                                                                                                                  |                               |
| 1 Fio guia Flexura™ de nitinol com ponta reta 0,46 mm (0,018 in.) de diâmetro externo x 50cm, dobrável                                                          |                               |
| 1 Bisturi de segurança                                                                                                                                          |                               |
| 1 Agulha Introdutora 21G (0,9mm de diâmetro externo x 0,45mm de diâmetro interno x 70mm de comprimento)                                                         |                               |
| 1 Tampa de extremidade                                                                                                                                          |                               |
| 1 Microintrodutor MicroEZ™ 3,5F (1,3mm de diâmetro interno x 1,8mm de diâmetro externo x 5cm de comprimento) com Dilatador Vascular (0,5mm de diâmetro interno) |                               |

| Catálogo                                                                                                                                                        | Descrição                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| S64244118                                                                                                                                                       | Provena Midline Duplo Lúmen 4F |
| 1 Cateter Provena Midline™ Duplo Lúmen 4F (1,45mm de diâmetro externo) x 20cm, com estilete de reforço interno / conjunto de fecho em T                         |                                |
| 1 Seringa 12 mL                                                                                                                                                 |                                |
| 1 Dispositivo de estabilização StatLock™ com protetor de pele Skin Protectant Prep Pad                                                                          |                                |
| 1 Cateter Introdutor IV Periférico de Segurança 20G (1,1mm de diâmetro externo x 45mm de comprimento)                                                           |                                |
| 1 Fita métrica                                                                                                                                                  |                                |
| 1 Fio guia Flexura™ de nitinol com ponta reta 0,46mm (0,018 in.) de diâmetro externo x 50cm, dobrável                                                           |                                |
| 1 Bisturi de segurança                                                                                                                                          |                                |
| 1 Agulha Introdutora 21 G (0,9mm de diâmetro externo x 0,45mm de diâmetro interno x 70mm de comprimento)                                                        |                                |
| 2 Tampas de extremidade                                                                                                                                         |                                |
| 1 Microintrodutor MicroEZ™ 4,5F (1,6mm de diâmetro interno x 2,3mm de diâmetro externo x 7cm de comprimento) com Dilatador Vascular (0,5mm de diâmetro interno) |                                |



# PICC Groshong™

## Cateter Central de Inserção Periférica

### Informação geral

#### Indicação de uso:

O cateter Groshong é indicado para o acesso periférico, de curto ou longo prazo, ao sistema venoso central para tratamento intravenoso e obtenção de amostras de sangue.

#### Validade:

42 meses

#### Composição do kit:

O cateter Groshong é fornecido estéril em uma bandeja vedada com um revestimento, selada dentro de uma embalagem plástica. A bandeja contém 01 Cateter, 01 Seringa 12cc luer, 01 Statlock, 01 Agulha introdutora 21G, 01 Fita métrica, 01 ou 02 Tampas de extremidade (dependendo do nº lúmen), 01 Bisturi com dispositivo de segurança, 01 Microintrodutor, asa de sutura, 01 cateter intravenoso agulhado 20G safety, 01 conector proximal (lúmen simples), 01 aleta para sutura, 01 Fio-guia e fita métrica.

### Informações do fabricante

#### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

#### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

#### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

#### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

#### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

### Apresentação e conteúdo

| PICC Groshong |                                           |                |             | QTD (un)  | Peso (g) |         | Medidas (cm) |     |       |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|-----|-------|
| Catálogo      | Descrição                                 | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido | C            | L   | A     |
| 76554058      | POWER PICC GROSHONG 4FR C MICROINTRODUTOR | 00801741035272 | 80689090140 | 1         | 188      | 169,2   | 88           | 264 | 174   |
| 7857505       | POWER PICC GROSHONG 4FR C MICROINTRODUTOR | 00801741035388 | 80689090127 | 1         | 200      | 180     | 27           | 17  | 2,000 |


#### Descrição:

#### PICC Groshong 4 fr – com Microintrodutor RMS 80689090140 Código: 7655405

Cateter central de inserção periférica com válvula distal de 4 Fr, mono lúmen, medindo 60 cm de comprimento com demarcação a cada 1 cm, construído em 100% silicone radiopaco, ponta arredondada fechada, atraumática, pré-montado em estilete metálico e radiopaco, com válvula de três posições na extremidade distal. Apresentado em bandeja contendo cateter, conector luer lock, dispositivo para sistema fechado, estabilizador Statlock® e kit para microintrodução composto por: agulha de 21 G x 7cm com sistema de segurança ativo, conjunto de introdutor e dilatador com 4.5Fr x 10cm, compatível com o fr do cateter, fio guia metálico 0,46mm com ponta atraumática, bisturi número 11 com sistema de segurança ativo. Embalagem individual, látex free, estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na Anvisa/M.S.

#### PICC Groshong 5 fr – com Microintrodutor – 45 cm RMS 80689090127 Código: 7857505

Cateter central de inserção periférica com válvula distal de 5 Fr, duplo lúmen, medindo 45 cm de comprimento com demarcação a cada 1 cm, construído em 100% silicone radiopaco, ponta arredondada fechada, atraumática, pré-montado em estilete metálico e radiopaco, com válvula de três posições na extremidade distal. Apresentado em bandeja contendo cateter, conector luer lock, dispositivo para sistema fechado, estabilizador Statlock® e kit para microintrodução composto por: agulha de 21 G x 7cm com sistema de segurança ativo, conjunto de introdutor e dilatador com 4.5Fr x 10cm, compatível com o fr do cateter, fio guia metálico 0,46mm com ponta atraumática, bisturi número 11 com sistema de segurança ativo. Embalagem individual, látex free, estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na Anvisa/M.S.

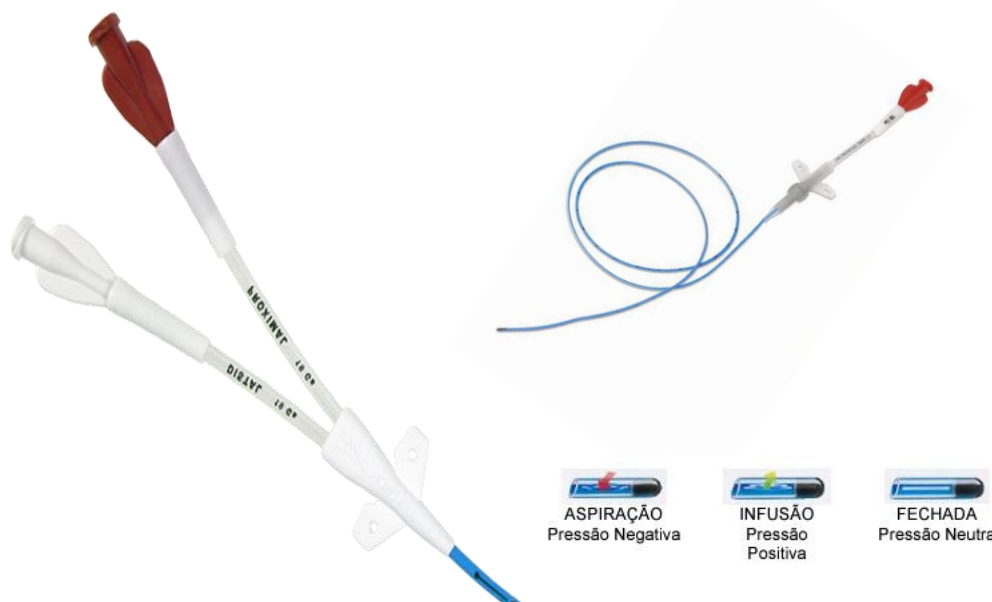

ASPIRAÇÃO  
Pressão Negativa

INFUSÃO  
Pressão Positiva

FECHADA  
Pressão Neutra



# Powerloc Max BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

O Conjunto de Infusão para Injeção Rápida POWERLOC™ MAX é um conjunto de infusão intravascular com uma agulha não perfurante de ângulo reto e mecanismo de segurança de prevenção contra picadas de agulha ativado manualmente, reduzindo o risco de lesões por picadas de agulha acidentais através da proteção da agulha. A agulha é utilizada para acessar ports vasculares implantados cirurgicamente. O Conjunto de Infusão para Injeção Rápida POWERLOC™ MAX destina-se a ser utilizado na administração de fluidos e fármacos, bem como coleta de amostras de sangue através de ports vasculares cirurgicamente implantados.

### Validade:

42 meses

### Composição do kit:

O conjunto de Infusão para Injeção Rápida POWERLOC™ MAX é fornecido em embalagem estéril e apirogênica, esterilizado por óxido de etileno. A embalagem contém 01 conjunto de infusão para injeção de calibre 20G e 19mm, 25mm e 38mm.

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agricola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

## Apresentação e conteúdo

| Powerloc Max BD™ |                       |                |             |           | QTD (un) | Peso (g) |      | Medidas (cm) |     |  |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|----------|----------|------|--------------|-----|--|
| Catálogo         | Descrição             | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido  | C    | L            | A   |  |
| 0142075          | Powerloc Max 20Gx0,75 | 00801741047459 | 80689090178 | 1         | 21,6     | 19,44    | 11,4 | 124          | 194 |  |
| 0142010          | Powerloc Max 20Gx1    | 00801741047442 | 80689090178 | 1         | 21,6     | 19,44    | 11,4 | 124          | 194 |  |
| 0142015          | Powerloc Max 20Gx1,5  | 00801741047459 | 80689090178 | 1         | 21,6     | 19,44    | 11,4 | 124          | 194 |  |

### Descrição:

AGULHA DESCARTAVEL TIPO HUBBER P/PUNÇÃO EM CATETER TIPO PORT, SUPORTA ALTO FLUXO, ALTA PRESSÃO E INFUSÃO DE CONTRASTE, **CALIBRE 19G X 19MM**, ESTERIL, APIROGENICA, C/RIGIDEZ COMPATIVEL C/O USO, ISENTA DE ASPEREZA, LUBRIFICADA C/SILICONE DE PUREZA FARMACEUTICA, DEVENDO PROPORCIONAR PUNÇÃO SUAVE E PRECISA S/TRAUMATISMO DOS TECIDOS E DO SILICONE DO RESERVATÓRIO; C/TUBO VINILICO TRANSPARENTE DE +- 20CM, C/CLAMP E CONECTOR LUER LOCK; BAIXO PERFIL, C/BASE EM PLASTICO TRANSPARENTE C/FORMATO APROPRIADO P/FACILITAR A PUNÇÃO, VISUALIZAÇÃO E A FIXAÇÃO NA PELE, ADAPTAVEL PORT DUPLA CÂMARA, C/SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA AGULHA PÓS PUNÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA DESC. TIPO HUBBER P/CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL DE ALTO FLUXO E ALTA PRESSÃO, CAL. 19G X 25MM C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.

AGULHA DESCARTAVEL TIPO HUBBER P/PUNÇÃO EM CATETER TIPO PORT, SUPORTA ALTO FLUXO, ALTA PRESSÃO E INFUSÃO DE CONTRASTE, **CALIBRE 19G X 25MM**, ESTERIL, APIROGENICA, C/RIGIDEZ COMPATIVEL C/O USO, ISENTA DE ASPEREZA, LUBRIFICADA C/SILICONE DE PUREZA FARMACEUTICA, DEVENDO PROPORCIONAR PUNÇÃO SUAVE E PRECISA S/TRAUMATISMO DOS TECIDOS E DO SILICONE DO RESERVATÓRIO; C/TUBO VINILICO TRANSPARENTE DE +- 20CM, C/CLAMP E CONECTOR LUER LOCK; BAIXO PERFIL, C/BASE EM PLASTICO TRANSPARENTE C/FORMATO APROPRIADO P/FACILITAR A PUNÇÃO, VISUALIZAÇÃO E A FIXAÇÃO NA PELE, ADAPTAVEL PORT DUPLA CÂMARA, C/SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA AGULHA PÓS PUNÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA DESC. TIPO HUBBER P/CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL DE ALTO FLUXO E ALTA PRESSÃO, CAL. 19G X 38MM C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.

AGULHA DESCARTAVEL TIPO HUBBER P/PUNÇÃO EM CATETER TIPO PORT, SUPORTA ALTO FLUXO, ALTA PRESSÃO E INFUSÃO DE CONTRASTE, **CALIBRE 19G X 38MM**, ESTERIL, APIROGENICA, C/RIGIDEZ COMPATIVEL C/O USO, ISENTA DE ASPEREZA, LUBRIFICADA C/SILICONE DE PUREZA FARMACEUTICA, DEVENDO PROPORCIONAR PUNÇÃO SUAVE E PRECISA S/TRAUMATISMO DOS TECIDOS E DO SILICONE DO RESERVATÓRIO; C/TUBO VINILICO TRANSPARENTE DE +- 20CM, C/CLAMP E CONECTOR LUER LOCK; BAIXO PERFIL, C/BASE EM PLASTICO TRANSPARENTE C/FORMATO APROPRIADO P/FACILITAR A PUNÇÃO, VISUALIZAÇÃO E A FIXAÇÃO NA PELE, ADAPTAVEL PORT DUPLA CÂMARA, C/SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA AGULHA PÓS PUNÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA DESC. TIPO HUBBER P/CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL DE ALTO FLUXO E ALTA PRESSÃO, CAL. 22G X 19MM C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

AGULHA DESCARTAVEL TIPO HUBBER P/PUNÇÃO EM CATETER TIPO PORT, SUPORTA ALTO FLUXO, ALTA PRESSÃO E INFUSÃO DE CONTRASTE, **CALIBRE 22G X 19MM**, ESTERIL, APIROGENICA, C/RIGIDEZ COMPATIVEL C/O USO, ISENTA DE ASPEREZA, LUBRIFICADA C/SILICONE DE PUREZA FARMACEUTICA, DEVENDO PROPORCIONAR PUNÇÃO SUAVE E PRECISA S/TRAUMATISMO DOS TECIDOS E DO SILICONE DO RESERVATÓRIO; C/TUBO VINILICO TRANSPARENTE DE +- 20CM, C/CLAMP E CONECTOR LUER LOCK; BAIXO PERFIL, C/BASE EM PLASTICO TRANSPARENTE C/FORMATO APROPRIADO P/FACILITAR A PUNÇÃO, VISUALIZAÇÃO E A FIXAÇÃO NA PELE, ADAPTAVEL PORT DUPLA CÂMARA, C/SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA AGULHA PÓS PUNÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGULHA DESC. TIPO HUBBER P/CATETER TOTALMENTE IMPLANTAVEL DE ALTO FLUXO E ALTA PRESSÃO, CAL. 22G X 25MM C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

AGULHA DESCARTAVEL TIPO HUBBER P/PUNÇÃO EM CATETER TIPO PORT, SUPORTA ALTO FLUXO, ALTA PRESSÃO E INFUSÃO DE CONTRASTE, **CALIBRE 22G X 25MM**, ESTERIL, APIROGENICA, C/RIGIDEZ COMPATIVEL C/O USO, ISENTA DE ASPEREZA, LUBRIFICADA C/SILICONE DE PUREZA FARMACEUTICA, DEVENDO PROPORCIONAR PUNÇÃO SUAVE E PRECISA S/TRAUMATISMO DOS TECIDOS E DO SILICONE DO RESERVATÓRIO; C/TUBO VINILICO TRANSPARENTE DE +- 20CM, C/CLAMP E CONECTOR LUER LOCK; BAIXO PERFIL, C/BASE EM PLASTICO TRANSPARENTE C/FORMATO APROPRIADO P/FACILITAR A PUNÇÃO, VISUALIZAÇÃO E A FIXAÇÃO NA PELE, ADAPTAVEL PORT DUPLA CÂMARA, C/SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA AGULHA PÓS PUNÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.



# Guia de Agulha BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

Os Kits de Guias/Anguladores de Agulha para Ultrassom proporcionam orientação para uma agulha intersectar um feixe de ultrassons a uma distância fixa abaixo da pele, para ajudar o profissional de saúde na inserção da ponta de uma agulha em uma estrutura específica. Os Kits de Guias/Anguladores de Agulha para Ultrassom e de Coberturas de Sondas disponibilizam uma cobertura de proteção (bainha de plástico) para embainhar um transdutor ultrassônico e isolar um local de penetração cirúrgica de qualquer contaminação microbiana e outras.

### Validade:

42 meses

### Composição do kit:

Cada kit Guia de agulha é fornecido em embalagem estéril e apirrogênica, esterilizado por óxido de etileno, contendo: Guia de Agulha que pode ser 18G, 20G e 22G, bainha de plástico estéril para sonda descartável, gel condutor de ultrassom e bandas elásticas.

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

## Apresentação e conteúdo

| Guia de agulha™ |                           |                |             | QTD (un)  | Peso (g) |         | Medidas (mm) |     |     |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|-----|-----|
| Catálogo        | Descrição                 | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido | C            | L   | A   |
| 9001C0214       | 20 GA                     | 00801741037825 | 80689090109 | 1         | 64       | 57,6    | 26           | 160 | 130 |
| 9001C0212       | 18 GA                     | 00801741037818 | 80689090109 | 1         | 64       | 57,6    | 26           | 154 | 134 |
| 900013B01       | 21 GA                     | 00801741037771 | 80689090109 | 1         | 64       | 57,6    | 26           | 134 | 154 |
| 9001C0197       | Cobertura estéril com gel | 00801741037801 | 80689090109 | 1         | 60       | 54      | 26           | 154 | 134 |

### Descrição:

#### Conjunto para punção vascular – 20 GA (9001C0214)

Composto por kit de punção por ultrassom para agulhas de 20 gauge, cobertura plástica estéril de 120 cm de comprimento, para transdutor, acompanhada por dois elásticos fixadores livre de látex, sachê estéril contendo 20g de gel condutor base aquosa, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 0,5, 1,5, 2,5 e 3,5 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na (RMS: 80689090109)

#### Conjunto para punção vascular – 18 GA (9001C0212)

Composto por kit de punção por ultrassom para agulhas de 18 gauge, cobertura plástica estéril de 120 cm de comprimento, para transdutor, acompanhada por dois elásticos fixadores livre de látex, sachê estéril contendo 20g de gel condutor a base aquosa, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 1,5, 2,5 e 3,5 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na (RMS: 80689090109)

#### Conjunto para punção vascular – 21 GA (900013B01)

Composto por kit de punção por ultrassom para agulhas de 21 gauge, cobertura plástica estéril de 120 cm de comprimento, para transdutor, acompanhada por dois elásticos fixadores livre de látex, sachê estéril contendo 20g de gel condutor base aquosa, anguladores estéreis de punção para acessar vasos de 1,0, 1,5 e 2,0 cm de profundidade, acopláveis ao transdutor, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na (RMS: 80689090109)

#### Cobertura estéril com gel para probe do ultrassom (9001C0197)

Composto por cobertura estéril para ultrassom, cobertura plástica estéril de 120 cm de comprimento, para transdutor, acompanhada por dois elásticos fixadores livre de látex, sachê estéril contendo 20g de gel condutor base aquosa, anguladores estéreis de punção para acesso, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência e registro na (RMS: 80689090109)



# Statlock BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

O Dispositivo de Fixação sem sutura em Polietileno ou malha de poliéster StatLock, é um adesivo indicado como alternativa para o uso de suturas na estabilização de um cateter vascular.

### Validade:

42 meses

### Composição do kit:

O dispositivo de estabilização StatLock™ é fornecido em embalagem estéril e apirrogênica, esterilizado por óxido de etileno. A embalagem contém 01 dispositivo de estabilização StatLock™ com protetor de pele Skin Protectant Prep Pad e 01 tira para estabilização durante a troca do Statlock.

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

## Apresentação e conteúdo

| Statlock™ |           |                |             | QTD (un)  | Peso (g) |         | Medidas (mm) |     |     |
|-----------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|-----|-----|
| Catálogo  | Descrição | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido | C            | L   | A   |
| CV0220CE  | StatLock  | 00801741081507 | 80689090183 | 1         | 16,8     | 15,12   | 9,6          | 164 | 170 |
| VPPSPCE   | StatLock  | 00801741083419 | 80689090185 | 1         | 10,4     | 9,36    | 4,8          | 164 | 174 |
| NN0202    | StatLock  | 00801741082887 | 80689090129 | 1         | 7,2      | 6,48    | 4,7          | 164 | 170 |

### Descrição:

#### Descritivo StatLock® (CV0220CE)

Dispositivo estéril para estabilização de cateter central de curta permanência e PICC, estéril, adesiva em espuma de poliéster medindo 8cm x 3cm e retentor plástico medindo 3cm x 1,5cm, sachê preparatório de pele, embalado em material que promova barreira asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência.

#### Descritivo StatLock® (VPPSPCE, VPPSPCE)

Dispositivo estéril para estabilização de cateter central de curta permanência e PICC, estéril, adesiva em espuma de polietileno medindo 8cm x 3cm, sachê preparatório de pele, embalado em material que promova barreira asséptica. Estéril a óxido de etileno, de uso único, com dados de identificação, data de validade, número de lote, procedência.

#### StatLock® (NN0202)

Dispositivo de estabilização sem sutura em malha autoadesiva de Tyvek®, uso único, livre de látex, com postes fixos para acomodar PICCs e CVC (Cateter Venoso Central) neonatais de várias marcas, remoção com álcool 70%, indicado troca a cada 7 dias. Acompanha sachê preparatório de pele. Embalagem unitária que permite a abertura asséptica, estéril, dados de identificação do produto, data de validade e procedência.



# Site Scrub BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

O dispositivo IPA Site Scrub destina-se ao uso em conectores e hubs luer fêmeas para limpeza e desinfecção, desenvolvido para desinfetar através de atrito por fricção.

### Validade:

36 meses

### Composição do kit:

O dispositivo IPA Site Scrub™ é esterilizado utilizando radiação, sem látex de borracha natural em sua composição. Cada dispositivo possui cerdas de polietileno com álcool isopropílico 70% estéril.

## Apresentação e conteúdo

| Site Scrub™ |            |                |             | QTD (un)  | Peso (g) |         | Medidas (mm) |     |     |
|-------------|------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------|--------------|-----|-----|
| Catálogo    | Descrição  | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto    | Líquido | C            | L   | A   |
| 3882100     | Site Scrub | 00801741082887 | 80689090056 | 1         | 7,2      | 6,48    | 4,7          | 164 | 170 |

### Descrição:

Site Scrub® 3882100

Dispositivo portátil em forma cônica composta por espuma de polietileno de alta densidade. Contém cerdas estéreis impregnada com solução de álcool isopropílico 70% estéril. O recipiente é vedado por lacre destacável. Adaptável em todos os dispositivos intravenosos de conectores e saídas de lúmens. Não contém látex. Uso único. O produto é disponibilizado em caixas de papelão contendo 25 e/ou 100 unidades.

Prazo de Validade: 36 meses

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110



Método  
de esterilização  
**EO**

Validade  
**4 anos**



Livre de Látex



Certificação



# Introsyte BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

BD-Introsyte™ é um introdutor feito de polietileno para punção e inserção de cateteres PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) e os produtos Midline. A punção com o introdutor BD-Introsyte permite a passagem da agulha (será retirada após a punção), juntamente com o cateter (permanecerá no local para posterior introdução dos cateteres PICC ou Midline). Após a inserção do cateter, o introdutor BD-Introsyte é partido ao meio e removido do local da punção.

### Validade:

42 meses

### Composição do kit:

O BD-Introsyte é fornecido em embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização. Cada embalagem possui 01 introdutor bipartível de 26G compatível com o calibre 1.9Fr e agulha com 1.9 cm em aço inoxidável.

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço:

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

## Apresentação e conteúdo

| Introsyte™ |                         |                |             | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |    |   |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|----|---|
| Catálogo   | Descrição               | EAN            | Anvisa      | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L  | A |
| 384021     | BD INTROSYTE 1.9FR 0.75 | 00382903840212 | 10033430714 | 1         | 16        | 14      | 21           | 13 | 1 |

## Descrição

Conjunto introdutor de agulha e cateter periférico tipo "bi-partido", descartável, estéril, constituído em polietileno, usado na inserção com cateter central de inserção periférico (PICC); Agulha constituída em aço inoxidável, de formato cilíndrico, reta, oca, com bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas e defeitos, polida, isenta de asperezas e ondulações, centralizada ao longo do eixo central longitudinal da asa de empunhadura (borboleta). Possui rigidez compatível ao uso e siliconizada. A fixação e vedação ao canhão deve ser perfeita e segura. Possui "notch" (orifício localizado à 2 mm do calcanhar, do bisel da agulha), que possibilita a visualização mais rápida do refluxo sanguíneo através da parede do cateter, disponível no calibre 26G. Fornecido em embalagem individual em papel grau cirúrgico e plástico resistente de acordo com o processo de esterilização. A embalagem deverá garantir a integridade do produto durante o seu armazenamento e até o momento de sua utilização.



# Site Rite 8 BD™

## Informações gerais

### Indicação de uso:

O Sistema de ultra-sons Site Rite® 8 é um dispositivo portátil que inclui imagiologia por ultra-sons em 2D em tempo real, aplicações para acesso vascular personalizadas, documentação de procedimentos, ferramentas de medição de vasos e conectividade eletrônica (quando ativada). Destina-se a ser utilizado em imagiologia por ultra-sons de diagnóstico do corpo humano. As aplicações clínicas específicas incluem: pediátrica, vaso periférica, pequenos órgãos (mama, tireóide, paratireóide, testículos), músculo-esquelética (convencional e superficial) e cardíaca (adulto e pediátrica).

### Validade:

Indeterminada

### Composição do kit:

O Sistema de ultra-sons Site Rite® 8 pode ser fornecido juntamente com um carrinho para mantê-lo fixo e facilitar o uso, sensor do sistema Sherlock (adulto e pediátrico) e probe de 20 e 32 mm. O sistema é composto de conexão via wi-fi para integração com o PACS.

## Informações do fabricante

### Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0013-31  
I.E.: 10102026-60

### Endereço

Rua Cyro Correia Pereira 550, Curitiba (PR)  
81170-230, Brasil

### Registrado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.  
CPNJ: 21.551.379/0001-06  
I.E.: 36701692100-66

### Endereço:

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 273  
Juiz de Fora (MG), 36092-060, Brasil

### Centro de Distribuição:

Praça Agrícola La Paz Tristante, 121 - Parte 2  
Osasco (SP), 06276-035, Brasil  
CPNJ: 21.551.379/0008-74  
I.E.: 492.525.368.110

## Apresentação e conteúdo

| Site Rite 8™ |           |                |        | QTD (un)  | Peso (kg) |         | Medidas (cm) |     |     |
|--------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-----|-----|
| Catálogo     | Descrição | EAN            | Anvisa | Shelfpack | Bruto     | Líquido | C            | L   | A   |
| 9770373      |           | 00801741202643 |        |           | 0,675     | 0,608   | 40           | 29  | 6,8 |
| 9770378      |           | 00801741218569 |        |           | 1,1       | 1       | -            | -   | -   |
| 9770601      |           | 00801741138294 |        |           | 520       | 468     | 314          | 214 | 60  |
| 9770603      |           | 00801741138218 |        |           | 521       | 468     | 310          | 214 | 54  |
| 9770660      |           | 00801741213236 |        |           | 5,44      | 4,8     | 476          | 424 | 324 |

## Descrição

Aparelho de ultrassom para punção de acessos vasculares portátil, com peso de 2,3 kg e imagem bidimensional em tempo real, teclas em touch screen, sonda linear de frequência 7,5 - 10 MHz com ganho de profundidade entre 0,5 a 6 cm, apresentando encaixe de guia de agulhas para realização de Punção Guiada por Ultrassom. Possui a tecnologia de mensuração de estruturas vasculares em tempo real e modo de confirmação de ponta de cateter por ECG (Modo Sherlock®) fonte de alimentação com adaptador CA e bateria interna. Pode ser fornecido com probe de 20 mm e 32 mm. O aparelho de ultrassom Site Rite possui conexão via wi-fi para integração com o PACS. A apresentação do produto deve obedecer a legislação vigente ANVISA/MS.

