



IMAX Indústria e Comércio Ltda.

+55 11 98824 1498

contato@imaxsurgical.com.br

www.imaxsurgical.com.br



## Quebrador de Ampolas

**Descrição** O quebrador de Ampolas foi desenvolvido para quebrar bico de ampolas. Este acessório é um produto descartável. É de uso único. O produto é composto por material em 100 % polipropileno.

**Indicação:** A utilização do clip nasal durante a espirometria pode ser indicada para garantir a precisão das medidas da função pulmonar, minimizando a interferência da respiração nasal nos resultados do teste.

**Recomendações de Uso:** Retirar o quebrador de ampola da embalagem; acoplar o quebrador sobre o bico da ampola e fechar; quebrar a ampola; descartar o quebrador com o vidro da ampola em local apropriado.

**Apresentação comercial:** O quebrador de ampolas apresenta-se embalado individualmente em filme plástico transparente e posteriormente acondicionados em caixas de papelão. Vendidos na forma não estéril.

**Composição:** O corpo do dispositivo é composto por plástico 100% polipropileno.

**Dimensão:** O quebrador de ampolas apresenta-se em tamanho único.

**Precauções:** Manter sempre o produto em sua embalagem original. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora de seu prazo de validade. Descartar após o uso em local apropriado.

**Advertência:** Produto de uso único, proibido reprocessar.

**Armazenamento:** Conservar o produto em sua embalagem original. O armazenamento deverá ser feito em local limpo e seco. Manter ao abrigo do calor e da luz solar direta.

**Validade:** Válido por 5 anos a partir da data de fabricação.

**Registro ANVISA:** Este produto é isento de registro na ANVISA



Estrada Municipal Ismael Leme Mourão, 1100 - Bairro Bom Retiro dos Mourões - CEP 12.929-990 - Bragança Paulista, SP.