

DESCRIPTIVO TÉCNICO SERODREN (SISTEMA DE DRENAGEM) DT - 001; Revisão

Frasco para Drenagem (Serodren) - **Registro Anvisa: 81479119009**



- Descrição, indicação e características:

Frasco em PVC cristal, atóxico, rígido, isento de látex, estéril, com capacidade de 500, 1000, 2000, 3500 e 5000ml, graduação de 25 a 50ml, tampa com rosca de 2 vias e 3 vias, com drenos de 10 a 40 french, alça para transporte e fixação, embalagem em papel grau cirúrgico, uso único e descartável. Extensão: em PVC grau médio, com comprimento de 50 cm a 600cm, clamp regulável, conector mola d'água, conector univesl e dreno de torax de 10 a 40 french.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

- Composição do produto:

- Frasco em PVC atóxico cristal
- Capacidade de 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml.
- Tampa com rosca em três vias.
- Alça para transporte e fixação.
- Extensão em PVC atóxica siliconizado (via paciente)
- Extensão PVC atóxica (via vácuo)
- Diâmetros variados.
- Clamp corta fluxo.
- Selo d'água
- Conector universal.
- Dreno de tórax: 08FR ao 40FR.
- Embalagem em papel grau cirúrgico.
- Base para sustentação.
- Estéril

- Modo de Uso:

- Verifique se o modelo do produto a ser utilizado realmente se aplica a finalidade desejada;
- Verifique a integridade da embalagem do produto e o prazo de validade;
- Abra a embalagem cuidadosamente utilizando técnica asséptica de forma a não anular sua esterilização;
- Conecte uma extremidade a fonte e ao terminal de uso certificando-se a correta conexão;
- Descarte após o uso

- Precauções e advertências:

- Em caso de vazamento, interromper o procedimento imediatamente;
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- Não utilizar se o prazo de validade estiver vencido;
- Os produtos SERODREN foram concebidos para **uso único** e exclusivo a somente um paciente;
- Não reutilizar;
- Armazenar em local limpo, longe do calor e da umidade.

A Seroplast **não se responsabiliza** por danos causados por utilização não conforme com o manual de uso.
Em caso de dúvidas, sugestões e/ou elogios entrar em contato em um dos meios citados ao final do documento.

Fabricado por:

SeroPlast Indústria e Comércio Hospitalar Eireli

CNPJ: 23.596.733/0001-36

IE.: 87.219.267

Seroplast[®]
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Alexandre Wagner Barata

Resp. Técnico: Alexandre Wagner Barata
CRF/RJ 16150