


# Youcircuit<sup>®</sup>

CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO

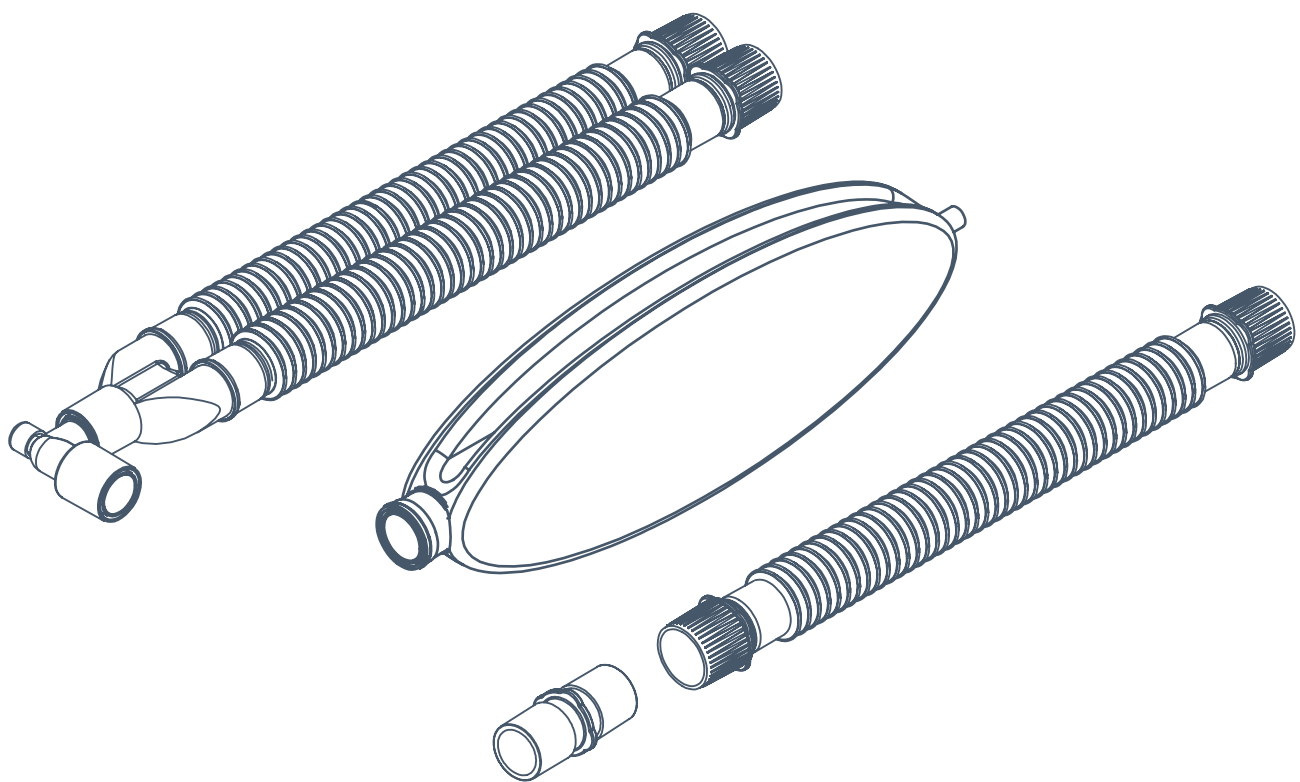

### YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO

#### FAMÍLIA DE CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS

## 01. FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO E AÇÃO

O YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO serve como uma ligação entre o paciente e o aparelho de ventilação mecânica e/ou máquina de anestesia.

É utilizado para o transporte de gases anestésicos, oxigênio ou outros gases, em pacientes submetidos à ventilação mecânica e/ou cirurgias, onde seja necessária a manutenção da respiração por longo período de tempo.

Fabricado de acordo com as normas de exigência de qualidade, o YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO é um dispositivo médico utilizado em conjunto com aparelhos de ventilação mecânica e aparelhos de anestesia.

As unidades são embaladas individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme Plástico e esterilizadas a Óxido de Etileno (ETO).

O YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO tem prazo de validade de três anos (36 meses), desde que a embalagem original seja mantida íntegra.

## 02. RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS E COMPOSIÇÃO

O YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO pode apresentar várias configurações, nas versões ADULTO e PEDIÁTRICO/NEONATAL, para desta forma atender todas as necessidades médicas.


O YOUCCIRCUIT® CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO, quando retirado da embalagem e esticado, pode chegar até 3m de comprimento, sendo passível de retração (traqueia corrugada) e voltar ao comprimento original. Com isso permite o anestesista deixar o ramo (inspiratório ou expiratório) do tamanho que desejar, facilitando o acesso e caso necessário, movimentação do paciente durante a cirurgia.

| Produto/Descrição                                                                     | Código      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Circuito Respiratório Adulto 2m                                                       | YCA-A2      |
| Circuito Respiratório Adulto 3m                                                       | YCA-A3      |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m                                          | YCA-P2      |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m                                          | YCA-P3      |
| Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M                        | YCA-A2R15   |
| Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M                        | YCA-A3R15   |
| Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M              | YCA-A2R15B3 |
| Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M              | YCA-A3R15B3 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M | YCA-P2R15B1 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M | YCA-P3R15B1 |

Composição: Polipropileno (PP) e Policloropropeno. Livre de látex.




### MODELO ADULTO

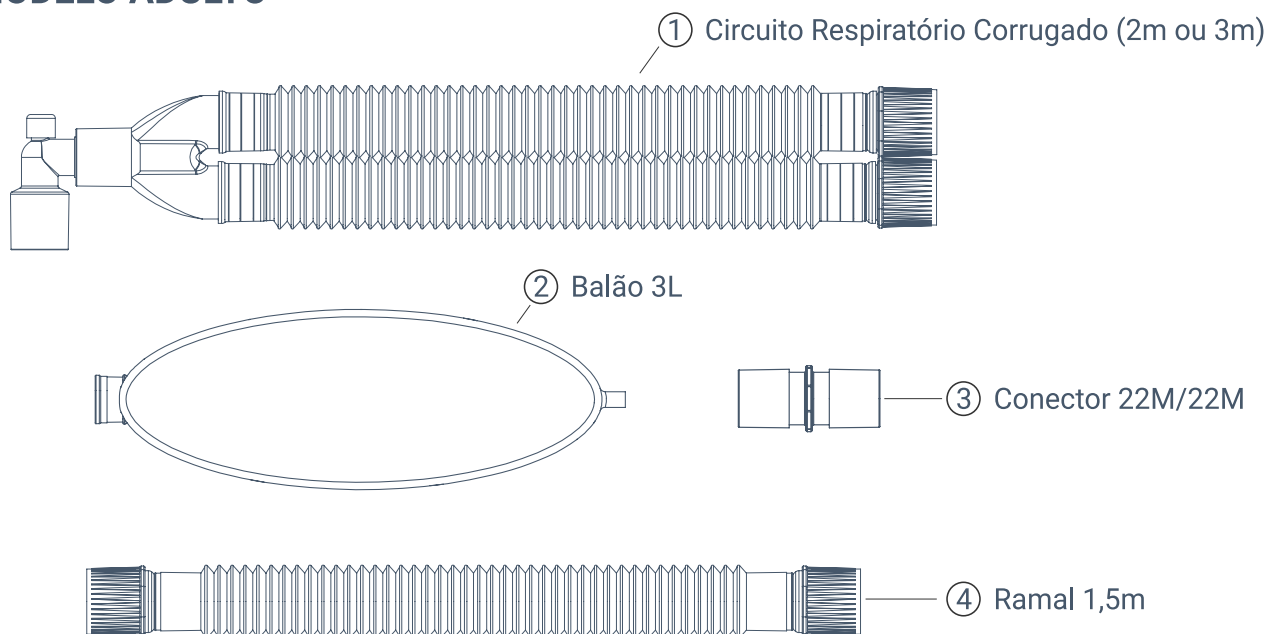

**NOTA:**

Ilustração referente a apresentação completa do Circuito Anestésico Adulto

### MODELO PEDIÁTRICO/NEONATAL

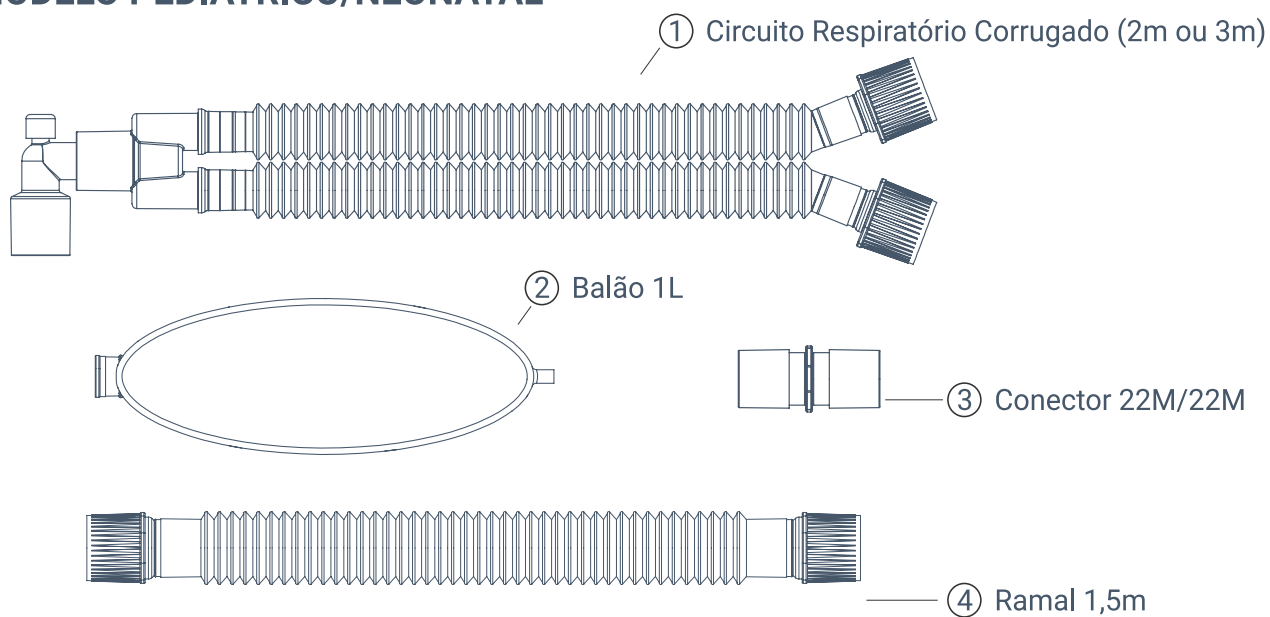

**NOTA:**

Ilustração referente a apresentação completa do Circuito Anestésico  
Pediátrico/ Neonatal

### 03. INSTRUÇÕES DE USO

O YOUCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO deve ser manipulado por profissional técnico devidamente capacitado e orientado pelo médico. Utilizar técnicas assépticas.

- Observar se a embalagem se apresenta íntegra, sem furos ou rasgos e dentro do prazo de validade;
- Abrir assepticamente a embalagem do produto no momento do uso;
- Retirar o YOUCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO da embalagem de proteção;
- Conectar a ponta proximal do circuito ao ventilador mecânico e/ou máquina de anestesia e a outra extremidade no paciente através do tubo endotraqueal ou máscara facial;
- Para apresentações com balão reservatório e ramal, conectar o balão e o ramal no local indicado na máquina de anestesia;
- Descartar o circuito após a utilização;
- Para o descarte do YOUCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO observe as leis nacionais e os regulamentos hospitalares aplicáveis para resíduos sólidos potencialmente infectantes;

### 04. PRECAUÇÕES E RESTRIÇÕES

- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo apresentar danos, perfurações ou umidade;
- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro de prazo de validade;
- Usar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem rebarbas, quebras, componentes se soltando e/ou presença de material estranho;
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados assépticos, de modo a se evitar qualquer contaminação;
- O YOUCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO somente deve ser utilizado de acordo com as Instruções de Uso do produto;
- Após o uso, fazer descarte do material conforme as Boas Práticas de Manuseio, ou seja, descartá-lo em lixeira destinada a materiais infectantes.



### 05. ADVERTÊNCIAS

#### PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

- Em caso de qualquer anormalidade quanto ao produto, embalagem ou prazo de validade, contate imediatamente o fabricante;
- A escolha quanto ao uso do produto deve ser feita por profissional da área médica;
- Verificar se a embalagem do YOUNCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO está intacta: qualquer dano, perfuração ou abertura pode comprometer a esterilidade e/ou desempenho do dispositivo. Neste caso, não usar a unidade em questão.

### 06. ARMAZENAMENTO

- Conservar e armazenar em local fresco e seco, ao abrigo de poeiras e incidência de luz solar direta;
- Observar as orientações específicas de “Material Esterilizado a Óxido de Etileno” e impedir contato com produtos tóxicos.

### 07. TRANSPORTE

As unidades do YOUNCIRCUIT<sup>®</sup> CIRCUITO RESPIRATÓRIO ANESTÉSICO são embaladas externamente em caixas de papelão que apresentam os dados do produto, razão social do fabricante, no de cadastro na ANVISA e responsável técnico.

- Transportar o produto em local limpo, seco e de forma a protegê-los da ação de luminosidade direta, umidade e calor;
- Não transportar o produto juntamente com outros que ofereçam risco de contaminação;
- Obedecer à orientação de empilhamento máximo descrito nas caixas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

DIMENSÕES DO PRODUTO

| CÓDIGO /<br>REFERÊNCIA | Embalagem Unitária<br>(Papel Grau Cirúrgico)<br>(comprimento x largura x altura) |                        |                      | Embalagem Venda<br>(Caixa de Papelão)<br>(comprimento x largura x altura) |                                 |                         |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                        | DIMENSÕES<br>(mm)                                                                | PESO<br>LÍQUIDO<br>(g) | PESO<br>BRUTO<br>(g) | DIMENSÕES<br>(mm)                                                         | QUANTIDADE<br>POR CAIXA<br>(un) | PESO<br>LÍQUIDO<br>(kg) | PESO<br>BRUTO<br>(kg) |
| YCA-A2                 | 500 x 360                                                                        | 174,0                  | 197,0                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 4,92                    | 6,27                  |
| YCA-A3                 | 500 x 360                                                                        | 234,5                  | 257,5                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 6,44                    | 7,79                  |
| YCA-P2                 | 500 x 360                                                                        | 144,0                  | 167,0                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 4,17                    | 5,52                  |
| YCA-P3                 | 500 x 360                                                                        | 217,5                  | 240,5                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 6,01                    | 7,36                  |
| YCA-A2R15B3            | 500 x 360                                                                        | 301,0                  | 324,0                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 8,10                    | 9,45                  |
| YCA-A3R15B3            | 500 x 360                                                                        | 360,5                  | 383,5                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 9,59                    | 10,94                 |
| YCA-P2R15B1            | 500 x 360                                                                        | 231,0                  | 254,0                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 6,35                    | 7,70                  |
| YCA-P3R15B1            | 500 x 360                                                                        | 308,5                  | 331,5                | 590 x 460 x 435                                                           | 25                              | 8,29                    | 9,64                  |

REGISTRO ANVISA

| Produto/Descrição                                                                     | Código      | Anvisa      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Circuito Respiratório Adulto 2m                                                       | YCA-A2      | 81484760008 |
| Circuito Respiratório Adulto 3m                                                       | YCA-A3      | 81484760008 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m                                          | YCA-P2      | 81484760008 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m                                          | YCA-P3      | 81484760008 |
| Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M                        | YCA-A2R15   | 81484760009 |
| Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m e Conector 22M/22M                        | YCA-A3R15   | 81484760009 |
| Circuito Respiratório Adulto 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M              | YCA-A2R15B3 | 81484760009 |
| Circuito Respiratório Adulto 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 3L e Conector 22M/22M              | YCA-A3R15B3 | 81484760009 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 2m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M | YCA-P2R15B1 | 81484760009 |
| Circuito Respiratório Pediátrico/Neonatal 3m, Ramal 1,5m, Bolsa 1L e Conector 22M/22M | YCA-P3R15B1 | 81484760009 |

CÓDIGO NCM: 9019.20.10





Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 361

Distrito Industrial - Jundiaí - SP - CEP 13213-009

Telefones: +55 11 4586-8868 / +55 11 4581-3737

sac@scavmedical.com.br - [www.scavmedical.com.br](http://www.scavmedical.com.br)

 scavmedical