

Catálogo de Modelos

Classe: DESCARTAVEL

Gerado em 04/09/2024 15:39:25

Pág. 1/1

Modelo

Características

**CLTMAS - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO
VOLUME 100ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES**

Finalidade: é utilizado na coleta de amostras de urina de pacientes pediátricos, para posterior diagnóstico clínico.

Composição: Polietileno e espuma de Poliuretano

Modo de usar:

1. Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso.
2. Fixar o coletor de urina na pele de modo a deixar a uretra em contato com a abertura do saco plástico.
3. Após a realização da coleta, encaminhar ao laboratório de análises clínicas.
4. Após a realização do exame, o técnico do laboratório deverá descartar o coletor em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

Precauções, Cuidados e Advertências

Não utilizar o produto caso esteja fora do prazo de validade ou com a embalagem individual violada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar o produto à temperatura ambiente em sua embalagem original, em local seco, arejado e ao abrigo do sol.

PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

Nota:

Característica:

- Graduado
- Com campo para identificação do paciente no coletor.

Registro(s) MS: 10379860178,10379860182,10379860201,10379860243,10379860182



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Dra. Daniela Freitas Amorim
COREN-SP Nº 151479