

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO POWERbreathe Plus MR

Controle: FTP-EXR-007

Versão: 03

Emissão: maio/2017

Página: 1/3

FABRICANTE:

POWERbreathe International – Reino Unido – Inglaterra

REGISTRO ANVISA:

81001390003

NCM:

9019.20.90

VALIDADE:

5 anos

GARANTIA:

24 meses

SIMPRO:

178597

CÓDIGO DO PRODUTO:

PB2002

EAN DO PRODUTO:

5060127407897

CAIXA DE EMBARQUE:

10 unidades



1 DESCRIÇÃO

O POWERbreathe foi adotado por profissionais da saúde como um aparelho de mecanoterapia para treinamento muscular respiratório. Por ser cientificamente comprovado para fortalecer os músculos inspiratórios, vêm sendo utilizado tanto como uma terapia individual ou em conjunto com a reabilitação pulmonar. Possui níveis de resistência ajustado por um conjunto de válvula e mola, de acordo com cada modelo, podendo ser ajustado manualmente.

O POWERbreathe Plus LR é a 2ª geração da linha, mais anatômico e leve, possuindo 10 níveis de ajuste.

É indicado para uso de terapia no tratamento de patologias respiratórias, como:

- Capacitador de treinamento funcional inspiratório;
- Portadores de DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Insuficiência cardíaca;
- Asma;
- Pós-operatório de cirurgia torácica;
- Auxílio no desmame de ventilação mecânica;
- Tratamento da fibrose cística e da doença neuromuscular.

2 COMPOSIÇÃO

- Bocal: PVC sem látex;
- Válvula: Borracha de silicone;
- Anilha: Borracha nitrílica;
- Mola: Aço inoxidável;
- Tensor: Nylon reforçado 66;
- Bolsa de fecho: PVC;
- Corpo principal, câmara inferior, tampa, botão de ajuste de carga e mola para nariz: Polipropileno.

3 MODO DE USAR

- a) Encaixe do bocal nos lábios para realizar as sessões de treinamento;
- b) Realizar uma expiração esvaziando totalmente o pulmão. Para ganho de força, o padrão de inspiração deve ser rápido e prolongado, por 30 repetições 2 x ao dia;
- c) Em paciente debilitado orientamos o exercício por um tempo determinado, respirando tranquilamente;
- d) Tornando-se fácil o exercício, basta ajustar o nível que aumentará a carga.

4 LIMPEZA

- O equipamento é completamente lavável;
- A higiene pode ser realizada utilizando detergente neutro e água corrente;
- Pastilhas higienizadoras próprias da marca ou as comercializadas para higienização de mamadeiras;
- Hipoclorito de sódio a 1%.

5 ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco, ao abrigo da luz.

6 CONTRAINDICAÇÕES

O POWERbreathe não é recomendado para:

- Pacientes com antecedentes de pneumotórax espontâneo;
- Tímpano rompido;
- Osteoporose grave;
- Asmático com baixa sensação de sintoma.

7 DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Peso: 149g;
- Dimensões: 15,5 cm x 16,5 cm x 7 cm (A x L x P);
- Nível de esforço: médio;
- Carga liberada: 23 a 186 cmH₂O.

Níveis	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Carga liberada	23 cmH ₂ O	39 cmH ₂ O	55 cmH ₂ O	72 cmH ₂ O	88 cmH ₂ O	104 cmH ₂ O	121 cmH ₂ O	137 cmH ₂ O	153 cmH ₂ O	170 cmH ₂ O	186 cmH ₂ O

8 CONTÉM

- POWERbreathe Plus MR;
- Clip nasal;
- Bolsa protetora;
- Manual do usuário.