

FICHA TÉCNICA
SKIN MARKERS ESTÉRIL MONTSERRAT

REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
T3023 TR03	CANETA ESTÉRIL DEMARCADORA DE PELE COM RÉGUA	CAIXA COM 50

DESCRIÇÕES / INTENÇÕES DE USO DO PRODUTO:

Os marcadores de pele ou “CANETAS SKIN MARKERS MONTSERRAT” são de caneta usados por cirurgiões (durante o procedimento cirúrgico) para marcar efetivamente o local de incisão.

As “CANETAS SKIN MARKERS MONTSERRAT” contêm tinta violeta genciana não tóxica e não tatuadora. Estão disponíveis em modelo estéril para uso na sala de cirurgia.

Molelos:

T3023 - Caneta Cirurgica Tondaus Ponta Dupla Estéril.

TR03-Caneta Cirurgica Tondaus Ponta Normal Estéril.

AVISOS/PRECAUÇÕES:

A tinta do marcador da pele deve ser aplicada somente na pele intacta. A superfície da pele deve estar limpa e seca antes da marcação. A tinta do marcador de pele não irá aderir à pele molhada.



O dispositivo é para uso único do paciente. Não se deve ser submetido à desinfecção e uso subsequente. Isto pode resultar em falha do dispositivo e/ou risco de contaminação.



O dispositivo em si não se destina a fazer quaisquer medições, no entanto, o produto inclui uma régua que se destina a ajudar a orientar o usuário em fazer uma linha reta aproximada, portanto, não fazendo quaisquer medições.



Não utilizar nos olhos!



Se a tinta estiver vazando ou secou, descarte o dispositivo e reponha o produto.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Remova a caneta da embalagem individual esterelizada;
- Remova a tampa da caneta;
- Faça a assepsia da área a ser demarcada e espere secar;
- Marque as áreas desejadas com a pele seca de acordo com o protocolo do estabelecimento;
- Deixe as marcações secarem por completo antes do procedimento cirúrgico;
- Descarte o marcador da pele após o uso em paciente individual;
- Manter a caneta sempre com a tampa após o uso.

Montserrat Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

Rua: Afonsina, 591 anexo 597, Rudge Ramos São Bernardo do Campo – SP CEP 09633-000.
Site: www.montserratshop.com.br E-mail: circumont@circumont.com.br Tel. (11) 4177-5453

**DESCARTE DO PRODUTO:**

Não há instruções especiais para o descarte do dispositivo, descarte em conformidade com as instruções de seu estabelecimento.

APRESENTAÇÃO:

- Corpo da caneta e tampa constituído em PP-polipropileno.
- Ponta dupla fina 0,5mm, grossa 1,0mm.
- Ponta normal 1.0mm
- Comprimento: 14 cm e 16cm
- Tinta violeta genciana – Fórmula: C₂₅H₃₀C₁N₃.
- Esterilização por método de radiação gama.
- Livre de Látex.
- Embalagem: 50 canetas por caixa
- Validade : 3 anos

Composição:

Caneta e tampa em PP prolipropileno: é um polímero, mais precisamente um termoplástico, derivado do propeno ou propileno e (plástico) molécula é (C₃H₆)_x. Tinta roxa: 30% Água destilada (H₂O) n° de CAS 7732-18-5 (utilizada para homogeneização no preparo da tinta), 50% Álcool isopropílico (C₃H₈O) n° de CAS 67-63-0 (utilizado como veículo e fixador do pigmento), 15% Violeta Genciana (C₂₅H₃₀C₁N₃) n° de CAS 548-62-9, 5% propan-2-OL (CH₂=CH-CH₃) n° de CAS 67-63-0 (a mistura destes dois componentes)

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Guardar em local com temperatura e umidade sob condições de temperatura de 15°C a 30°C e com umidade de 40% a 70%.
- Manter o produto longe de calor excessivo.
- Manter em local seco e arejado.

MANIPULAÇÃO:

- Produto deve ser aberto dentro de centro cirúrgico e manipulado em condições estéreis por profissional da saúde devidamente habilitado.

ADVERTÊNCIA:

- Material estéril de uso único, descartável.
- Adquirir o produto somente de revendedores autorizados.

PRECAUÇÕES:

- Verifique visualmente se há algum dano no produto antes de usar para assegurar que esteja em perfeitas condições.

FABRICADO POR:

Tondaus Technology Co., Limited
Flat/Rm, 7/F, Fa Yuen Comm Bldg No.75, Fa Yuen Street, Mong Kok, KL, Hong Kong.

Importado E Distribuído No Brasil Por:

Montserrat Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
CNPJ. 66.581.935/0001-17 - I.E. 635.232.288.110
Rua Afonsina, 591 anexo 597- Rudge Ramos São Bernardo do Campo – São Paulo – Brasil
Tel.: (+55) 11 4177-5453
Atendimento ao cliente sac@cirumont.com.br
Website: www.montserratshop.com.br
Responsável Técnico: Francisca L. Silva - CRF: 56.118
ANVISA- Isento

Montserrat Comercial Importadora e Exportadora Ltda.

Rua: Afonsina, 591 anexo 597, Rudge Ramos São Bernardo do Campo – SP CEP 09633-000.
Site: www.montserratshop.com.br E-mail: cirumont@cirumont.com.br Tel. (11) 4177-5453