



FICHA TÉCNICA

CANETA MINI FÁCIL REMOÇÃO MONTSERRAT



Indicação:

Os marcadores de pele ou “CANETAS MINE FÁCIL REMOÇÃO MONTSERRAT” são de caneta usados por cirurgiões (durante o procedimento cirúrgico e estéticos) para marcar efetivamente o local de incisão.

Modelos:

- ✓ Caneta Mini Fácil Remoção Montserra Branca
- ✓ Caneta Mini Fácil Remoção Montserrrat Verde
- ✓ Caneta Mini Fácil Remoção Montserrrat Vermelha

As “CANETAS MINE FÁCIL REMOÇÃO MONTSERRAT” não tóxica para uso na sala de cirurgia não estéril.

APRESENTAÇÃO:

- ✓ Corpo da caneta e tampa constituído em PP-polipropileno.
- ✓ Ponta dupla 1,0mm.
- ✓ Comprimento 9,5cm.
- ✓ Formula Bis 4-(N-etil-N-3-sulfofenil (CA384 4-45-9) Água (CA7732-18-5).
- ✓ Não estéril /Esterilizado.
- ✓ Livre de Látex.
- ✓ Pacote 100 unidades.
- ✓ Validade 3anos

INSTRUÇÕES DE USO:

- ✓ Remova a caneta da embalagem individual;
- ✓ Remova a tampa da caneta;
- ✓ Faça a assepsia da área a ser demarcada e espere secar;
- ✓ Marque as áreas desejadas com a pele seca de acordo com o protocolo do estabelecimento;
- ✓ Deixe as marcações secarem por completo antes do procedimento cirúrgico.
- ✓ Manter a caneta sempre com a tampa após o uso.
- ✓ Tinta de Fácil remoção basta utilizar lenço ou algodão com álcool;

DESCARTE DO PRODUTO:

Não há instruções especiais para o descarte do dispositivo, descarte em conformidade com as instruções de seu estabelecimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Guardar em local com temperatura e umidade sob condições de temperatura de 15°C a 30°C e com umidade de 40% a 70%.

- ✓ Manter o produto longe de calor excessivo.
- ✓ Manter em local seco e arejado.

MANIPULAÇÃO:

- Produto deve ser aberto dentro de centro cirúrgico e manipulado em condições estéreis por profissional da saúde devidamente habilitado .

ADVERTÊNCIA:

- ✓ Adquirir o produto somente de revendedores autorizados.

PRECAUÇÕES:

- ✓ Verifique visualmente se há algum dano no produto antes de usar para assegurar que esteja em perfeitas condições.

FABRICADO POR:

Tondaus Technology Co., Limited
Flat/Rm, 7/F, Fa Yuen Comm Bldg No.75, Fa Yuen Street, Mong Kok ,Kl ,Hong Kong.

Importado E Distribuído No Brasil Por:

Montserrat Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
CNPJ. 66.581.935/0001-17 - I.E. 635.232.288.110
Rua Afonsina, 591 anexo 597- Rudge Ramos São Bernardo do Campo – São Paulo – Brasil
Tel.: (+55) 11 4177-5453
Atendimento ao cliente sac@cirumont.com.br
Website: www.montserratshop.com.br
Responsável Técnico: Francisca L. Silva - CRF: 56.118
ANVISA- Isento.