



Fabricante e Detentor:
Salvapé Produtos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 60.883.741/0005-13
Rua Cesário Ramalho, 90 - Cambuci
01521 000 - São Paulo - SP

Informações Técnicas
Central de Atendimento
(11) 3346 4535
(11) 98639 8723
® Marca Registrada
Copyright © 2006 Salvapé

PRODUTOS ORTOPÉDICOS DA CABEÇA AOS PÉS



301-0
CÓDIGO

Contusões, luxações recidivantes e instabilidades graves do ombro, traumáticas ou de artrite reumatoide. Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursite, periartrites, sequelas de AVC e outras afecções.

Modo de usar, vide verso

SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS - SALVAPE.COM.BR

IMOBILIZADOR ESTOFADO DE MS BILATERAL TIPOIA VELPEAU



Foto ilustrativa



301-0

ALCA-029 - Rev. 06

Venda sob prescrição médica
Produto não perecível

IMOBILIZADOR ESTOFADO DE MS BILATERAL TIPOIA VELPEAU®

INDICAÇÕES • Imobilização do membro superior • Auxílio no tratamento de contusões, luxações, luxações recidivantes e instabilidades graves do ombro, traumáticas ou de artrite reumatoide. Fraturas do colo do úmero e do cotovelo, bursite, periartrites, sequelas de AVC e outras afecções do membro superior.

CARACTERÍSTICAS • Imobiliza o ombro, braço e antebraço • Fivelas plásticas manipuláveis com uma só mão.

COMPOSIÇÃO • Confeccionado em tecido com espuma, cadarços de nylon, passantes plásticos, botão de metal e fechos aderentes.

PRECAUÇÕES • Verificar sempre o tamanho e o lado correto (a tipoia deverá alcançar até as metacarpofalangeanas evitando posição viciosa da mão). Após colocação, ajustar as duas alças da tipoia, de forma que o braço e o antebraço formem um ângulo igual ou menor que 90° para evitar inchaço. **Obs.:** Esta peça vem montada para o braço direito, para usar do lado esquerdo, vire do avesso.

MODELO • Bilateral.

TAMANHOS • Infantil • PP • P • M • G • GG.

MÉTODO DE LIMPEZA • Lavar à mão utilizando detergente neutro e escova macia. Não usar produtos clorados. Não torcer. Secar à sombra.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO


MODO DE USAR

A tipoia deve ser colocada no paciente por outra pessoa.

- 1 - Para soltar as duas fivelas, pressionar a trava central com os dedos polegar e indicador e puxar;
- 2 - Para o braço esquerdo: retirar a tira de sustentação; virar a tipoia do lado avesso; passar a tira da cintura pelo orifício e recolocar a tira de sustentação;
- 3 - Soltar o botão de pressão e fecho aderente (localizado próximo ao punho), abrindo totalmente o envelope da tipoia;
- 4 - Colocar o braço dentro do envelope de forma que o cotovelo se encaixe no fundo da tipoia;
- 5 - Fechar o botão de pressão e o fecho próximo do punho;
- 6 - Passar a alça estofada pelas costas, abaixo do ombro, por trás do pescoço, acomodando a espuma no ombro contrário. Fechar a fivela;
- 7 - Passar a cinta de nylon pelas costas, contornando a cintura. Fechar a fivela;
- 8 - Após a colocação, ajustar as duas alças da tipoia, de forma que o braço e o antebraço formem um ângulo igual ou menor que 90°.

Obs.: A tipoia deverá ficar firme no corpo.

Tamanho	Medida entre A e B
Infantil	18 a 21 cm
PP	21 a 24 cm
P	24 a 28 cm
M	28 a 32 cm
G	32 a 36 cm
GG	36 a 40 cm

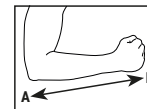

Fabricante e Detentor:

SALVAPE
Produtos Ortopédicos Ltda.

SALVAPE.COM.BR
R. Cesário Ramalho, 90
Cambuci - São Paulo - SP
CNPJ: 60.883.741/0005-13

Atendimento ao Consumidor:

☎ (11) 3346 4535

📞 (11) 98639 8723

® Marca Registrada
Copyright © 2006 SalvaPé

ANVISA nº: 81218560018

GARANTIA: Este produto tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia não cobre vícios de qualidade decorrentes de uso inadequado, acidentes ou adaptações/alterações. É de competência da SalvaPé reparar ou repor o produto após análise de vício de qualidade. É de competência do comprador remeter o produto ao endereço constante no verso desta garantia, de maneira segura para que o mesmo não sofra maiores danos. **IMPORTANTE:** Este produto é de uso individual, vetado a sua reutilização por terceiros.