

Título: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO

Ficha Técnica de Produto

Emissão: 07/08/2019

ANVISA: 80245210173

FM02000012 Revisão 00 de 09/09/2019

1. Indicação:

As Compressas de gaze hidrófila estéril com fio radiopaco são artigos médico-hospitalares, indicados para auxílio em procedimentos cirúrgicos, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatorios e prontos-socorros. Tem como finalidade absorver líquidos ou secreções, limpar e cobrir ferimentos e curativos em geral, nos quais a presença de microrganismos ou qualquer tipo de impureza não é tolerável

2. Especificação do Produto:

As compressas de gaze estéril com fio radiopaco são confeccionadas com fios 100% algodão, em tecido tipo tela. São fornecidas na forma estéril, esterilizadas por Óxido de etileno (ETO). Apresentações entre os tamanhos: 7,5x7,5cm (fechada) – 15x30cm (aberta) e 10x10cm (fechada) – 20x40cm (aberta), possuindo 13 fios/cm².

3. Características Gerais:

Característica	Especificação do Produto
Composição:	100% Algodão
pH	5,0 a 8,0
Retenção (%)	≥ 900
Hidrofilidade (s)	≥ 15
Substâncias gorduras (%)	≤ 0,8
Substâncias Solúveis (%)	≤ 0,8
Resíduos de incineração (%)	≤ 0,8
Alvejantes ópticos	Ausente
Amido	Ausente

4. Foto ilustrativa:



5. Apresentação do produto:

Código Cremer	Descrição	Unidades p/ envelope	Nº unidades por caixa	EAN-13
309980	Compressa Estéril ETO 13 Fios 10x10cm – RX	10	144	7891800310016
303056	Compressa Estéril ETO 13 Fios 7,5x7,5cm – RX	20	120	7891800303124
303032	Compressa Estéril ETO 13 Fios 7,5x7,5cm – RX	10	240	7891800303117

6. Validade:

5 anos.

7. Instruções de uso:

- ✓ Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido. Não é recomendado realizar a abertura da Compressa de gaze para a sua utilização;
- ✓ Realize a limpeza da pele ou ferida onde a gaze será aplicada;
- ✓ Após a limpeza, a pele em volta do ferimento deve estar seca;
- ✓ Aplique sobre a superfície desejada cobrindo todo o ferimento sem exercer força em sua utilização e sem pressionar sobre a pele ferida;
- ✓ Fixe a gaze com auxílio de uma cobertura secundária;
- ✓ Em caso de eventual irritação causada pelo uso da gaze, suspender o uso e procurar auxílio médico imediato.

Para a utilização e visualização do elemento radiopaco deve-se utilizar equipamento apropriado para detecção desse material. O uso desse equipamento é feito por profissional habilitado, e seu manuseio deve ser realizado de acordo com técnicas existentes para cada equipamento, visto que o nível de radiação utilizado para detecção varia de acordo com diversos fatores, não existindo um padrão para detecção.

8. Contra indicações:

Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

9. Precauções:

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.

10. Esterilização:

A esterilização de materiais consiste na eliminação de vida microbológica. Os produtos Cremer são produzidos a partir dos princípios das boas práticas de fabricação, atendendo as exigências para produtos para a saúde estéreis.

As Compressas de gaze estéril com fio radiopaco são esterilizadas por Óxido de etileno (ETO).

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa – CRF SC 5.774