



## FICHA TÉCNICA

ANVISA: 8147269012  
VALIDADE: 5 anos  
PRODUTO ESTÉRIL: SIM  
MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: Óxido de Etileno  
MATÉRIA PRIMA: PP; PVC; SUS304  
PRODUTO: EXACT SLIM HUBER  
USO ÚNICO – PRODUTO DESCARTÁVEL

### DESCRIÇÃO

As CANULAS DE HUBER EXACT SLIM destinam-se a serem utilizadas com sistema implantável de administração de medicamento (cateter permanentemente implantado), através de dispositivo de infusão para uso clínico para infusão de fluidos medicinais, transfusão e coleta de sangue. Podem ser utilizadas junto com bomba de infusão e suportam infusão de alta pressão atendendo até 325 PSI.

### CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS EXACT SLIM

- Conformidade com a NR 32
- DEHP FREE LATEX FREE
- NON CORING
- Bolsa almofadada e transparente (permite a visualização do ponto de acesso)
- Pinça controle de fluxo
- Luer lock

### APRESENTAÇÕES

Unitariamente com tampa de trava, interface cônica interna, tubulação, encaixe de trava, inserção de mangueira, local de injeção em Y/conector sem cânula, conexão do tubo rígido, placa de asa dupla, cabo de cânula, adesivo, tubo de agulha, tampa protetora.

### ADVERTÊNCIA/PRECAUÇÕES

Produto é proibido de ser usado em caso de embalagem primária danificada, tampa protetora removida, status anormal da ponta, prazo de validade expirado. Tome cuidado para evitar que o produto caia no chão. O produto é apenas para uso único, não o use repetidamente. Descarte-o após o uso. Manuseie todos os resíduos médicos de acordo com os Regulamentos de Resíduos Médicos ou equivalente e evite ferimentos. O uso do produto deve atender aos requisitos dos POPs do Departamento Médico e regulamentos relacionados e só pode ser usado por pessoal médico profissional. Nenhum sinal de infecção no local da punção para injeção.



### **CONTRAINDICAÇÃO**

Não utilize para infecção conhecida ou potencial, bacteremia ou septicemia relacionada.

Não use quando o tecido local não puder ser completamente desinfetado.

### **APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 19G X 20MM | HES19G20 |
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 19G X 25MM | HES19G25 |
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 20G X 15MM | HES20G15 |
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 20G X 20MM | HES20G20 |
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 20G X 25MM | HES20G25 |
| CANULA DE HUBER EXACTSLIM 20G X 38MM | HES20G38 |

### **Importado e Distribuído por:**

Dealermed Materiais Hospitalares Ltda, CNPJ 23.371.771./0001-90 AFE: 814726-8

Av. Engenheiro Caetano Alvares 6685 sala 41, Imirim- São Paulo –

SP – CEP 02413-200

Site [www.dealermed.com.br](http://www.dealermed.com.br)

E-mail: [sac@dealermed.com.br](mailto:sac@dealermed.com.br)

Responsável Técnica: Caroline Andrade Lima Fernandes CRF-SP 71871

### **Fabricado por:**

Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd

No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park,

Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province, PRC