

KIT VIVANOMED FOAM P, M, G e XG PARA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA VIVANO



Tamanho P



Tamanho M



Tamanho G



Tamanho XG

Descrição

Kit em bandeja contendo Espuma VivanoMed, Hydrofilm e VivanoTec Port. A Espuma VivanoMed é feita de Poliuretano/Poliéster flexível e estéril. Seus microporos auxiliam na distribuição da pressão negativa de modo uniforme. Os poros ajudam na drenagem do exsudato e na formação de tecido de granulação, além de reduzirem o risco de inflamação. VivanoMed acelera o processo de cicatrização, é de fácil remoção e não deixa resíduos no leito da ferida. Hydrofilm é um filme fino, transparente, autoadesivo e semi-permeável, impermeável à líquidos e bactérias e permeável ao vapor da transpiração da pele. O VivanoTec Port é estéril, flexível e macio e permite a drenagem adequada do exsudato.

Indicação

Indicado na Terapia por Pressão Negativa junto com a unidade de tratamento Vivano.

Composição

VivanoMed: Poliuretano/Hidrofóbico.

Hydrofilm: Poliuretano e Poliacrilato.

VivanoTec Port: Elastômero de Silicone, Copolímero de Estireno-Acrílico, Filme de Poliuretano transparente coberto de Acrilato adesivo.

Apresentação

Kit estéril em bandeja contendo espuma, Hydrofilm e VivanoTec Port. As espumas possuem opção de tamanhos P (10 x 7,5 x 3,3 cm), M (18 x 12,5 x 3,3 cm), G (25 x 15 x 3,3 cm) e XG: (2 espumas de 30 x 30 x 1,6 cm).

Instruções de uso

Preencher a cavidade da ferida com a espuma VivanoMed e fixar sua abertura com Hydrofilm de modo a não deixar nenhuma entrada de ar. Realizar um pequeno corte no filme de aproximadamente 2 x 3 cm e posicionar a extremidade do VivanoTec Port. Conectar VivanoTecPort na extensão do reservatório e acoplá-lo ao equipamento VivanoTec Pro.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Códigos

Tamanho	Código
P	409730-4P
M	409727-4P
G	409724-4P
XG	409732-4

Validade

03 anos

Fabricante

Paul Hartmann AG - Alemanha.

Registro – Anvisa (MS)

80170310093

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteadro de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

