

FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

NOME DO PRODUTO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COLORIDA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO: BAIXO RISCO

NOME TÉCNICO: MÁSCARA

MARCA: NAYR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICOS NAS LATERAIS E CLIPE NASAL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, POSSUI TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS E SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, SENDO A CAMADA INTERNA E EXTERNA CONSTITUÍDAS DE NÃO TECIDO SPUNBOND, QUE É MACIO E RESISTENTE, E A CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE NÃO TECIDO MELTBLOWN, QUE APRESENTA O ELEMENTO FILTRANTE, GARANTINDO A PROTEÇÃO BACTERIANA E EVITANDO O CONTATO COM FLUÍDOS CORPORAIS.

INFORMAÇÕES

- ATÓXICA
- HIPOALERGÊNICA
- REPELENTE À FLUÍDOS
- NÃO ESTÉRIL
- NÃO INFLAMÁVEL
- ISENTA DE FIBRA DE VIDRO
- USO ÚNICO
- BFE >95%
- EFP = 98%
- RESPIRABILIDADE = 2,05 MMH 20/CM²
- COR: LARANJA

COMPOSIÇÃO

- TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO;
- DUAS CAMADAS TNT SS E UMA CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE;
- CAMADA EXTERNA NA COR LARANJA EM TNT SS (SPUNBOND) 40 G/M²; CAMADA INTERNA 15 G/M²
- CAMADA INTERMEDIÁRIA EM TNT MELTBLOWN 26 G/M²;
- CAMADAS UNIDAS POR PROCESSO ELÊTRONICO DE ULTRASSOM;
- CLIPE NASAL;
- ELÁSTICO CONFORTÁVEL.

FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

INDICAÇÃO

PROTEÇÃO DA BOCA E VIAS NASAIS, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO USUÁRIO DO PRODUTO. BARREIRA DE USO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO CONTRA INALAÇÃO DE GOTÍCULAS TRANSMITIDAS À CURTA DISTÂNCIA E PELA PROJEÇÃO DE SANGUE E/OU OUTROS FLUÍDOS CORPÓREOS, QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO DO PRODUTO. IDEAL PARA USO EM ÁREA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.

TAMANHO

- ÚNICO
- LARGURA = 175 MM
- ALTURA = 97 MM
- CLIPE NASAL = 136 MM
- ELÁSTICO = 141 MM

INSTRUÇÕES DE USO

1. HIGIENIZAR AS MÃOS ANTES DE MANIPULAR A MÁSCARA;
2. RETIRAR A MÁSCARA DA EMBALAGEM ORIGINAL;
3. COLOCAR A MÁSCARA SOBRE O ROSTO, COMPREENDENDO AS ÁREAS DO NARIZ E DA BOCA;
4. COLOCAR OS ELÁSTICOS ATRÁS DAS ORELHAS;
5. AJUSTAR O CLIPE NO NARIZ, PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA;
6. APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO, SECO, FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ, UMIDADE E CALOR EXCESSIVO.

FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- PRODUTO DE USO ÚNICO
- PROIBIDO REPROCESSAR
- MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL
- APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO
- NÃO UTILIZAR CONTRA PATOLOGIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSÓIS, POIS INDEPENDENTE DE SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, A VEDAÇÃO DO ROSTO É PRECÁRIA NESTE TIPO DE MÁSCARA
- SE A INTEGRIDADE DA MÁSCARA ESTIVER COMPROMETIDA (POR EXEMPLO, POR FUROS OU RASGOS), ELA DEVE SER TROCADA ASSIM QUE POSSÍVEL.

PRAZO DE VALIDADE

2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO É GARANTIDA ENQUANTO AS EMBALAGENS PERMANECEREM ÍNTEGRAS, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ROTULAGEM DO PRODUTO.

EMBALAGEM

COR	CÓD. BARRAS	UNIDADES	MEDIDAS DA CAIXA	PESO DA CAIXA MASTER
LARANJA	7899356900859	50	52 cm comprimento X 39 cm largura X 4,7 cm altura	9,90 Kg

FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

FISCAL

NCM: 6307.90.10

CEST.: 28.059.00

IPI %: 0%

ICMS-ST (MVA – Margem de Valor Agregado): ICMS 12%

CST Origem (Código da Situação Tributária): 000

CST PIS: 1

CST COFINS: 1

CÓDIGO INTERNO PRODUTO (como aparece na NF):

CÓDIGO	ITEM	COR
85568	MÁSCARA 50 UNIDADES	LARANJA

ANVISA

82020320001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA ANTUNES DE FREITAS COREN-MS 406.309

FABRICAÇÃO

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96

PARQUE INDUSTRIAL II

MUNDO NOVO - MS

CNPJ: 02.582.267/0001-60

I.E.: 28.334.894-1

CONTATO

VENDAS@NAYR.COM.BR

WWW.NAYRSAUDE.COM.BR

